



Als de zorg mag kiezen, kiest de zorg voor Lopital



Periodiek preventief
onderhoud en inspectie

Tango XXL Douche-Toiletstoel

Tango XXL Douche-Toilet stoel

51005800



Belangrijk!

De Tango XXL dient minimaal 1 keer per jaar periodiek onderhouden en geïnspecteerd te worden.

Service en onderhoud aan de Tango XXL is alleen toegestaan door daartoe door Lopital geautoriseerde personen en met originele reserveonderdelen.

Het aanbrengen van wijzigingen aan de constructie kan de veiligheid van de Tango XXL aantasten. Bovendien vervallen hiermee de aansprakelijkheid en garantievoorwaarden van Lopital. De Tango XXL voldoet hierdoor niet meer aan de verordening MDR (EU) 2017/745 voor medische hulpmiddelen.

Elke inspectie of reparatie dient te worden genoteerd in het logboek.

De gemiddelde technische levensduur van de Tango XXL is 10 jaar, mits dagelijks en periodiek onderhoud wordt uitgevoerd.

Fabrikant

Lopital Nederland B.V.
Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
T +31 (0)13 5239300
www.lopital.nl, info@lopital.nl

Inhoudsopgave

1.	Algehele staat van de stoel.....	4
2.	Wielen	5
3.	Armleggers.....	7
4.	Voetsteun	8

1. Algehele staat van de stoel
2. Wielen
3. Armlegger
4. Voetsteun

C= Controleren

S= Smeren

A= Aanbevolen vervanging (of delen vervangen)

V= Vervangen (of delen vervangen)



Maand	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Algehele staat	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PUR	C	C	C	C	A	C	C	C	C	A
Wielen	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Armleggers	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Voetsteun	C	C	C	C	A	C	C	C	C	A

1. Algehele staat van de stoel

Maand	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	C	C	C	C	A	C	C	C	C	A

Benodigd gereedschap

- Lakstift Sikkens A77A2

- Controleer of alle stickers nog aanwezig en leesbaar zijn.
 - Serienummersticker:
 - Is het serienummer nog leesbaar?
 - Is de datamatrix nog leesbaar voor een scanner?
 - Is het CE logo nog zichtbaar?
 - Keuringssticker:
 - Is de keuringsdatum nog leesbaar?
 - QR sticker:
 - Is de QR-code nog leesbaar voor een QR scanner?
- Controleer alle gelakte onderdelen visueel op beschadigingen en roestvorming. Indien nodig bijlakken.
- Controleer de PUR onderdelen op ernstige verkleuring (vooral bruin) en op beschadigingen.
- Controleer of alle schroeven aanwezig zijn en vast zitten. Ook van de geleider!

Het is sterk aan te bevelen om elke 5 jaar de zitting en rug te vervangen, in verband met de hygiëne.

Aanwezig:

- Voetsteun (geen afkeerpunt)


2. Wielen

Maand	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C


Benodigd gereedschap

- Inbussleutel 8mm

Nieuwe versie: Vanaf serienummer 5800.18.050

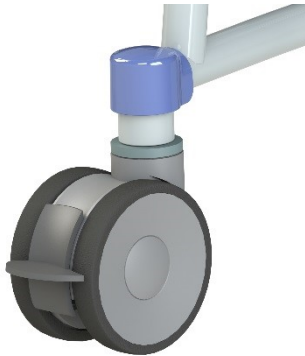

Figuur 1 Wiel

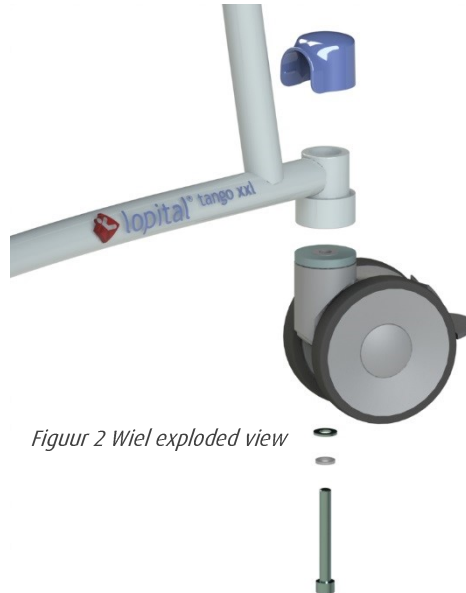

Figuur 2 Wiel exploded view

- Controleer de bevestiging van het wiel (speling).
- Controleer de werking van vrijloop + remmen.
- Controleer of alle 4 de wielen het grondvlak raken. Zo niet, controleer de stoel op rechtloop.
- Controleer of het remlipje intact is.
- Controleer het loopvlak.


Indien er aan één van deze voorwaarden niet wordt voldaan, vervang het wiel.

De serienummers 5800.18.030 t/m 5800.18.049 zijn gemonteerd met de nieuwe wielen (dubbelrol) en een adapter set. Er wordt bij deze stoelen nog gebruik gemaakt van het oude frame (5800-11.8)

Oude versie: Vóór serienummer 5800.18.030



Figuur 3 Wiel

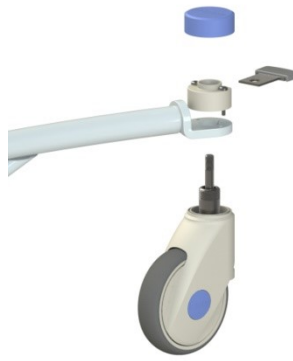

Figuur 4 Wiel exploded view

- Controleer de bevestiging van het wiel (speling).
- Controleer de werking van vrijloop + remmen.
- Controleer of alle 4 de wielen het grondvlak raken. Zo niet, controleer de stoel op rechtloop.
- Controleer of de remknop intact is.
- Controleer of de ontgrendellip intact is.
- Controleer het loopvlak.

Indien er aan één van deze voorwaarden niet wordt voldaan, vervang het wiel.

3. Armleggers

Maand	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Benodigd gereedschap

- Inbussleutel 6mm

- Controleren op werking, beschadigingen, roest vorming en speling.
- Staan de armleggers evenwijdig?
- Schroeven goed aantrekken.

Kijk voor een exploded view op www.lopital.nl



Figuur 5 Armlegger

4. Voetsteun

Maand	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	C	C	C	C	A	C	C	C	C	A

Benodigd gereedschap

-

Nieuwe versie: Vanaf serienummer 5800.20.007

Stoelen vanaf dit serienummer zijn uitgevoerd met een in lengte verstelbare voetsteun.

- Controleer de voetsteun op beschadigingen.
- Controleer of de voetplaten gelijk staan en iets schuin omhoog naar het midden. Zo niet, controleer ook het frame.
- Controleer of de verstelling nog op de juiste manier werkt en er geen beschadigingen zijn.



Figuur 5 Voetsteun

Het is sterk aan te bevelen om elke 5 jaar de voetplaten te vervangen, i.v.m. hygiëne.

Oude versie: vóór serienummer 5800.20.007

- Controleer de voetsteun op beschadigingen.
- Controleer of de voetplaten gelijk staan en iets schuin omhoog naar het midden. Zo niet, controleer ook het frame.

Het is sterk aan te bevelen om elke 5 jaar de voetplaten te vervangen, in verband met hygiëne.



Figuur 6 Voetsteun

Voor vragen over het onderhoudsprotocol raadpleeg Lopital (telefoon +31 (0)13 5239300 of mail info@lopital.nl). U dient het serienummer (rood omrand) door te geven aan Lopital. Zie hiervoor de serienummersticker op het product.

 lopital®		MD _____	
Laarakkerweg 9		REF _____	
5061 JR Oisterwijk		SN _____	
The Netherlands			
T: (031)13-5239300		 --- KG/---LBS	
IPX-		 _____	
Weight: -- kg		CE	(01)-----
Type battery: ---		Revision -	(11)-----
Drives operates: -- V			(21)-----
Charge: ---V--- mA			
Non continuous: -----			



Als de zorg mag kiezen, kiest de zorg voor Lopital



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl

Lopital Nederland B.V. Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
Tel +31 (0)13 5239300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.be

Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
Tel +32 (0)3/870.51.60, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be

MAIN 5800-2024-01