

Tango douche-toiletstoel

Instructiekaart

01. Veiligheidsvoorschriften

- Lees vóór gebruik de gebruikershandleiding (www.lopital.nl).
- De maximale belasting is 180 kg.
- Zorg ervoor dat de stoel op de rem staat tijdens cliëntentransfers van en naar de stoel.
- Plaats de voeten op de voetensteun.



02. Gebruik

1. Breng de stoel in de juiste positie en draai de voetensteunen weg.
2. Zet de stoel op de rem!
3. Klap indien nodig de armsteunen omhoog.
4. Ondersteun de persoon met beperking bij het gaan zitten.
5. Klap de armsteunen naar beneden en laat de voeten van de cliënt op de voetplaten rusten.

Opstaan gebeurt in omgekeerde volgorde.


5100 5700

Tango



03. Wielblokkering

1. Wielblokkering.
2. Ontgrendelen.

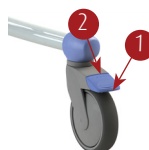


04. Voetensteun

Beide voetplaten dienen weggeklapt te zijn als de cliënt op de stoel gaat zitten. Dit kan door middel van het opklappen van de voetplaten (1) of door het wegdraaien van beide steunen (2). Zorg ervoor dat de cliënt met beide voeten op de voetplaten rust tijdens het verrijden.



05. Armsteun

1. Opklappen armsteun

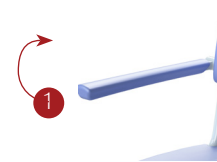

06. Toiletfunctie

- Verwijder voordat de cliënt plaats heeft genomen de deksel van de zitting.
- *In combinatie met toilet:* de Tango kan over bijna ieder toilet gereden worden. Beweeg de stoel omhoog of omlaag voor de juiste positie.
- *Met ondersteek:* De Tango kan ook als toiletstoel gebruikt worden. Schuif hiervoor de RVS / kunststof ondersteek in de geleider onder de stoel.

07. Reiniging en onderhoud

De Tango dient na ieder gebruik gereinigd te worden met water en normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Gebruik hiervoor geen schuurmiddel of andere agressieve oplosmiddelen. Indien nodig kunnen PUR delen met een oplossing van 70% ethanol of propanol gedesinfecteerd worden. Het volledige onderhoudsschema en schoonmaakprotocol is te vinden in de gebruikershandleiding (www.lopital.nl).

Volgens de verordening MDR (EU) 2017/745 voor medische hulpmiddelen moet de Tango volgens de richtlijnen van de producent onderhouden worden. Het onderhoudsprotocol is te vinden op de website van Lopital (www.lopital.nl).

Belangrijk!

Deze instructiekaart mag niet worden gezien als vervanging van de gebruikershandleiding!

In geval van storing contact opnemen met Lopital.

Tel: +31 (0) 13-5239300

E-mail: info@lopital.nl

Gebruikershandleiding
 Voor een uitgebreide
 gebruikershandleiding
 gaat u naar: www.lopital.nl



 **ISO CERTIFIED**
 9001 - 13485 - 14001

INSCC5700-2026-01 NL