




### Gebruik

1. Zet de stoel op de rem!
2. Klap de voetsteunen omhoog.
3. Klap indien nodig de armleggers omhoog.
4. Ondersteun de persoon met beperking bij het gaan zitten.
5. Sluit de armleggers en laat de voeten van de persoon met beperking op de voetplaten rusten.

Opstaan gebeurt in omgekeerde volgorde.

### Wielblokkering

1. Wielblokkering.
2. Ontgrendelen.

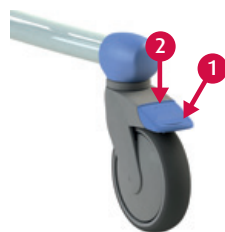

### Voetensteun



Beide voetplaten dienen weggeklapt te zijn als de persoon met beperking op de stoel gaat zitten. Dit kan door middel van het opklappen van de voetplaten (1) of door het wegdraaien van beide steunen (2). Zorg ervoor dat de persoon met beperking met beide voeten op de voetplaten rust tijdens het verrijden.

### Armlegger



1. Opklappen armlegger.

### Toiletfunctie

- Verwijder voordat de persoon met beperking plaats heeft genomen de deksel van de zitting.
- *In combinatie met toilet:* De Tango kan over bijna ieder toilet gereden worden.
- *Met ondersteek:* De Tango kan ook als toiletstoel gebruikt worden. Schuif hiervoor de RVS / kunststof ondersteek in de geleider onder de stoel.

### Reiniging en onderhoud

De Tango dient na ieder gebruik gereinigd te worden met water en normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddel of andere agressieve oplosmiddelen. Controleer regelmatig de wielen op haren, stof en zeepresten en verwijder deze waar nodig. Het volledige onderhoudsschema is te vinden in de gebruikershandleiding (**te vinden op: [www.lopital.nl](http://www.lopital.nl)**).

In geval van storing contact opnemen met Lopital.  
**Tel:** +31 (0)13 - 5239300, **Fax:** +31 (0)13 - 5239301  
**E-mail:** [service@lopital.nl](mailto:service@lopital.nl)

### Gebruikershandleiding

Voor een uitgebreide gebruikershandleiding gaat u naar: **[www.lopital.nl](http://www.lopital.nl)**

### Veiligheidsvoorschriften

- Lees de gebruikershandleiding (te vinden op: [www.lopital.nl](http://www.lopital.nl)) vóór gebruik zorgvuldig door.
- Maximale belasting 180kg.
- Zorg ervoor dat de stoel op de rem staat tijdens personentransfers van en naar de stoel.
- Plaats de voeten op de voetsteun.

### Belangrijk!


Deze instructiekaart mag niet worden gezien als vervanging van de gebruikershandleiding.



### Utilisation

1. Verrouillez le frein de la chaise.
2. Rabattez les repose-pied vers le haut.
3. Rabattez au besoin les accoudoirs vers le haut.
4. Assistez la personne à mobilité réduite lorsque celle-ci s'assoie.
5. Refermez les accoudoirs et placez les pieds de la personne à mobilité réduite sur les repose-pieds. Lorsque la personne se met debout, procédez dans l'ordre inverse.

### Frein de roue

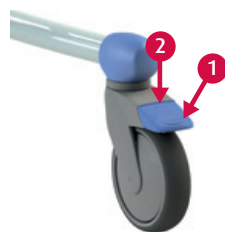

1. Verrouillage du frein de roue.
2. Déverrouillage.

### Repose-pied



Les deux repose-pieds doivent être dégagés avant que la personne à mobilité réduite ne s'assoie dans la chaise. Relevez pour cela les repose-pieds (1) ou écartez-les en les faisant pivoter (2). Veillez à ce que la personne garde les deux pieds sur les repose-pieds lorsque la chaise est en déplacement.

### Accoudoir



1. Relever les accoudoirs.

### Fonction toilettes

- Retirez le couvercle de l'assise avant que la personne ne s'assoie.
- *Compatibilité avec WC* : La chaise Tango peut être disposée au-dessus de la plupart des cuvettes WC.
- *Bassin hygiénique* : la chaise Tango peut être directement utilisée comme WC en adaptant un bassin hygiénique en plastique / Inox sous le siège.

### Nettoyage et entretien

Après chaque utilisation, la chaise Tango doit être nettoyé à l'eau avec un produit d'entretien ménager courant. N'utilisez pas d'accessoires abrasifs ou de produits solvants agressifs. Vérifiez que les roues sont exemptes de cheveux, de traces de savon ou de poussières régulièrement et nettoyez-les le cas échéant. Le plan d'entretien complet est repris dans le mode d'emploi ([www.lopital.fr](http://www.lopital.fr)).

En cas de panne, adressez-vous à Lopital.  
**Tél:** +31 (0)13 - 5239300, **Fax:** +31 (0)13 - 5239301  
**E-mail:** [service@lopital.nl](mailto:service@lopital.nl)

### Mode d'emploi

Retrouvez l'ensemble des modes d'emploi sur :  
**[www.lopital.fr](http://www.lopital.fr)**

### Instructions de sécurité

- Avant toute utilisation, lisez attentivement le mode d'emploi ([www.lopital.fr](http://www.lopital.fr)).
- Mise en charge max 180kg.
- Mettez toujours le frein pour transférer le client de / vers la chaise.
- Disposez les pieds de la personne sur le repose-pied.

### Important !

Il ne faut pas considérer cette fiche d'instructions comme remplacement du mode d'emploi.