



Periodiek preventief  
onderhoud en inspectie

Beknopt onderhoudsprotocol

Tango XXL Douche-Toiletstoel

# Tango XXL Douche/Toilet stoel

51005800 (Standaard)



## Inhoudsopgave

Introductie.....	3
Onderhoudsschema voor zorgverlener .....	4
Onderhoudsschema voor technische dienst/inspecteur/monteur.....	5

### Fabrikant

Lopital Nederland B.V.  
Laarakkerweg 9  
5061 JR Nederland  
T (0031) 13 52 39 300  
F (0031) 13 52 39 301  
[www.lopital.com](http://www.lopital.com)  
E-mail algemeen: [info@lopital.nl](mailto:info@lopital.nl)  
E-mail service: [service@lopital.nl](mailto:service@lopital.nl)

# Introductie

## Periodiek preventief onderhoud en inspectie

Om de Tango XXL in optimale conditie te houden, is het noodzakelijk om op de aangegeven momenten de volgende maatregelen uit te voeren.

De Tango XXL moet volgens het bijgeleverde onderhoudsschema onderhouden worden en minimaal 1 keer per jaar worden geïnspecteerd.

Reparaties en onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door hiertoe aantoonbaar vakbekwame en specifiek opgeleide personen die goed bekend zijn met ontwerp, gebruik en verzorging van het product. Reparaties en onderhoud dienen te worden uitgevoerd met originele Lopital reserveonderdelen.

Het aanbrengen van wijzigingen aan de constructie kan de veiligheid van de Tango XXL aantasten. Bovendien vervallen hiermee de aansprakelijkheid en garantievoorwaarden van Lopital. De Tango XXL voldoet hierdoor niet meer aan de richtlijn voor medische hulpmiddelen (93/42/EEG).

Alle werkzaamheden aan de Tango XXL dienen te worden genoteerd in een logboek.



# Onderhoudsschema voor zorgverlener

*Preventief onderhoud uitgevoerd door zorgverlener*

De Tango XXL dient na ieder gebruik gereinigd te worden met water en normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Verwijder de overtollige zeepresten. PUR integraal schuimdelen met IMC coating worden bij voorkeur d.m.v. wrijven gereinigd en desinfecteert. Gebruik hiervoor geen schuurmiddel of andere agressieve oplosmiddelen. Uit praktische ervaringen is gebleken dat normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen met geringe hoeveelheid alcohol (max. 5%) hiervoor het meest geschikt zijn. Voor het desinfecteren wordt (op basis van lange termijn testen) het middel Neoquat combi® aanbevolen. Indien nodig kunnen PUR delen met een oplossing van 70% ethanol of propanol ontsmet worden.

Er moet op worden toegezien dat zowel het desinfecteren als het reinigen d.m.v. wrijven gebeurt, en niet d.m.v. onderdompelen. De inwerktijd van de middelen hebben een significante invloed op de levensduur van de PUR delen. Vanwege de materiaaleigenschappen van PUR moet contact met scherpe voorwerpen worden vermeden. Dit kan leiden tot beschadiging of scheurvorming in het materiaal. Tenslotte wijzen wij u erop dat ook niet kritieke delen van de PUR delen gereinigd en ontsmet moeten worden. Controleer regelmatig het frame en de wielen op haren, stof en zeepresten en verwijder deze waar nodig.

Onderhoudsschema	
Na ieder gebruik	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stoel reinigen met water en normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen.</li></ul>
Dagelijks	<ul style="list-style-type: none"><li>• PUR integrale schuimdelen reinigen en desinfecteren.</li><li>• Controleren of alle onderdelen van de Tango XXL aanwezig zijn, zoals de voetensteun.</li></ul>
Wekelijks	<ul style="list-style-type: none"><li>• Frame reinigen.</li><li>• Wielen controleren op haren, stof en zeepresten en verwijderen waar nodig.</li><li>• Controleren of de werking van de stoel nog goed is.</li><li>• Controleer de vergrendeling van de armlegger.</li></ul>
Jaarlijks	<ul style="list-style-type: none"><li>• Volgens de richtlijn medische hulpmiddelen moet een stoel volgens de richtlijnen van de producent onderhouden worden. Bij voorkeur dient dit te worden gedaan door Lopital. Lopital biedt de mogelijkheid om de stoel 1 keer per jaar grondig te inspecteren en onderhouden, middels het Periodiek Preventief Onderhoud.</li></ul> <p>Voor meer informatie over het onderhoudscontract kunt u contact opnemen met Lopital (<a href="mailto:service@lopital.nl">service@lopital.nl</a>) of met uw leverancier.</p>



# Onderhoudsschema voor technische dienst/inspecteur/monteur

*Preventief onderhoud en inspectie moet worden uitgevoerd volgens onderstaand protocol.*

Om letsel en/of een onveilig hulpmiddel te voorkomen, moet het onderhoud met de juiste regelmaat worden uitgevoerd door hiertoe aantoonbaar vakbekwame en specifiek opgeleide personen die goed bekend zijn met ontwerp, gebruik en verzorging van het product, die de hiervoor bestemde gereedschappen en onderdelen gebruiken en over kennis van de geldende onderhoudsprocedures beschikken.

• = Controleren S = Smeren A = Aanbevolen vervanging (of delen vervangen) V = Vervangen (of delen vervangen) R = Reinigen

Maand	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Algehele staat - Controleer of het logboek en gebruikershandleiding aanwezig zijn. - Controleer of de stickers leesbaar zijn. - Controleer de stoel op beschadigingen / roestvorming. - Controleer of alle schroeven aanwezig zijn en vast zitten.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PUR - Controleer het pur op verkleuring/beschadiging. Bij beschadiging altijd vervangen.	•	•	•	•	A	•	•	•	•	A
Wielen - Controleer de wielbevestiging, vrijloop en remmen. - Controleer of alle 4 de wielen het grondvlak raken. - Controleer of de remknop en het ontgrendellipje intact zijn. - Controleer het loopvlak. (Versie van voor 2014 upgraden d.m.v. beschermdop op wielprop en behandelen eventuele roestvorming.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Armlegger - Controleer de armleggers op werking, beschadiging, roestvorming en speling. - Staan de armleggers evenwijdig?	•	V	•	V	•	V	•	V	•	V
Voetensteun - Controleer de voetensteun op beschadigingen en werking. - Controleer of de voetplaten gelijk staan en iets schuin omhoog naar het midden. - Het is sterk aan te bevelen elke 5 jaar de voetplaten te vervangen.	•	•	•	•	A	•	•	•	•	A