



Veiligheidsvoorschriften

- Lees de gebruikershandleiding (te vinden op: www.lopital.nl) vóór gebruik zorgvuldig door.
- Maximale belasting 180kg.
- Zorg ervoor dat de stoel op de rem staat tijdens persontfers van en naar de stoel.
- Plaats de voeten op de voetensteun.
- Voorsluiting gesloten bij hoog / laag bewegen en armen op armlegger laten rusten.
- Rijd en manoeuvreer alleen met de stoel in een lage positie.

Bedieningspaneel



Belangrijk!

Deze instructiekaart mag niet worden gezien als vervanging van de gebruikershandleiding.

Gebruik

1. Activeer de Elexo door middel van de omhoogknop 2 seconden in te drukken. Let op: Na gebruik gaat de Elexo binnen 60 minuten in slaapstand.
2. Breng de stoel in de juiste positie en klap de voetensteunen omhoog.
3. Zet de stoel op de rem!
4. Open de armleggers en klap deze zo nodig omhoog.
5. Ondersteun de persoon met beperking bij het gaan zitten.
6. Sluit de armleggers en laat de voeten van de persoon met beperking op de voetplaten rusten.

Opstaan gebeurt in omgekeerde volgorde.

Wielblokkering




Voetensteun



Beide voetplaten dienen weggeklapt te zijn als de persoon met beperking op de stoel gaat zitten. Dit kan door middel van het opklappen van de voetplaten (1) of door het wegdraaien van beide steunen (2). Zorg ervoor dat de persoon met beperking met beide voeten op de voetplaten rust tijdens het verrijden.

Armlegger met voorsluiting

1. Ontgrendelen.
2. Roteren.
3. Opklappen.

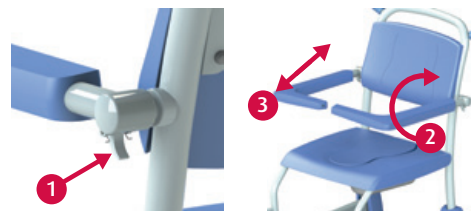

Opladen batterij

Sluit de Elexo na gebruik aan op de lader, voor het behoud van de batterijen.



- | | |
|-----------------|--------------------------|
| Uit | Slaapstand. |
| Groen | Stoel bedrijfsklaar. |
| Knippert oranje | Noodstop is geactiveerd. |
| Oranje | Batterij is half leeg. |
| Knippert rood | Batterij bijna leeg. |
| Rood | Batterij leeg. |


Tijdens het laden werkt de Elexo niet.

Toiletfunctie

- Verwijder voordat de persoon met beperking plaats heeft genomen de deksel van de zitting.
- *In combinatie met toilet:* De Elexo kan over bijna ieder toilet gereden worden. Beweeg de stoel omhoog of omlaag voor de juiste positie.
- *Met ondersteek:* De Elexo kan ook als toiletstoel gebruikt worden. Schuif hiervoor de RVS / kunststof ondersteek in de geleider onder de stoel.

Nooddaal

Als alle functies van de Elexo uitgevallen zijn, is het mogelijk de stoel te laten zakken met behulp van de nooddaalknop.

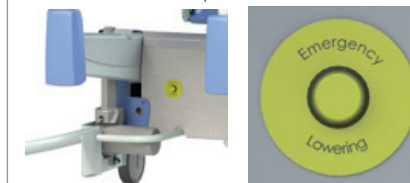

Reiniging en onderhoud

De Elexo dient na ieder gebruik gereinigd te worden met water en normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddel of andere agressieve oplosmiddelen. Controleer regelmatig de wielen op haren, stof en zeepresten en verwijder deze waar nodig. Het volledige onderhoudsschema is te vinden in de gebruikershandleiding (**te vinden op: www.lopital.nl**).

In geval van storing contact opnemen met Lopital.
Tel: +31 (0)13 - 5239300, **Fax:** +31 (0)13 - 5239301
E-mail: service@lopital.nl

Gebruikershandleiding

Voor een uitgebreide gebruikershandleiding gaat u naar: www.lopital.nl



Instructions de sécurité

- Avant toute utilisation, lisez attentivement le mode d'emploi (www.lopital.fr).
- Mise en charge max. : 180kg.
- Mettez toujours le frein pour transférer le client de / vers la chaise.
- Placez les pieds de la personne sur le repose-pied.
- Lors du réglage en hauteur, engagez la barre de fermeture avant et disposez les bras de la personne sur l'accoudoir.
- La chaise doit toujours être en position basse lors des déplacements et des manœuvres.

Panneau de commande

Réglage vers le haut



Réglage vers le bas



Mise en marche



2 secondes


Important !

Il ne faut pas considérer cette fiche d'instructions comme remplacement du mode d'emploi.

Utilisation

1. Allumez l'Elexo en enfonçant pendant 2 secondes le bouton de réglage vers le haut.
Remarque : Après utilisation, la chaise Elexo se met en veille après 60 minutes.
 2. Ajustez la position de la chaise et relevez le repose-pied.
 3. Verrouillez les freins de la chaise.
 4. Ouvrez les accoudoirs et, au besoin, rabattez-les vers le haut.
 5. Assistez la personne à mobilité réduite lorsque celle-ci s'assoie.
 6. Refermez les accoudoirs et placez les pieds de la personne à mobilité réduite sur les palettes du repose-pied.
- Lorsque la personne se met debout, procédez dans l'ordre inverse.

Frein de roue

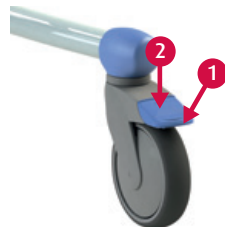

1. Verrouillage du frein de roue.
2. Déverrouillage.


Repose-pied



Les deux repose-pieds doivent être dégagés lorsque la personne à mobilité réduite s'assoie. Rabattez pour cela vers le haut les repose-pied (1) ou écartez-les en les faisant pivoter (2). Assurez-vous que la personne à mobilité réduite garde les deux pieds sur le repose-pied lorsque la chaise est en déplacement.

Accoudoir avec fermeture avant

1. Déverrouillage.
2. Rotation.
3. Rabattre vers le haut.

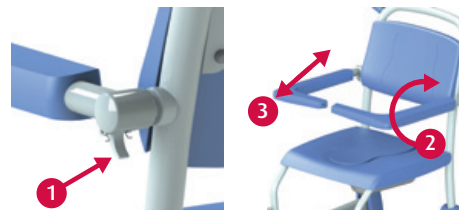

Rechargement des batteries

Après utilisation, raccordez la chaise Elexo au chargeur afin de maintenir les batteries opérationnelles.
Éteint État de veille.



- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| Vert | Chaise opérationnelle. |
| Orange clignotant | L'arrêt d'urgence est activé. |
| Orange | Batterie à mi-charge. |
| Rouge clignotant | Batterie quasi déchargée. |
| Rouge | Batterie déchargée. |


Pendant le chargement des batteries, l'Elexo n'est pas utilisable.

Fonction toilettes

- Retirez le couvercle de l'assise avant que la personne ne s'assoie.
- *Compatibilité avec WC* : La chaise Elexo peut être disposée au-dessus de la plupart des cuvettes WC. Ajustez la hauteur du siège.
- *Bassin hygiénique* : la chaise Elexo peut être directement utilisée comme WC en adaptant un bassin hygiénique en plastique / Inox sous le siège.

Abaissement d'urgence

En cas d'arrêt de toutes les fonctions du Elexo, utilisez le bouton d'abaissement d'urgence pour redescendre le siège.

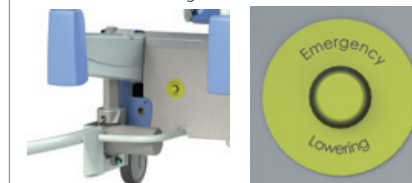

Nettoyage et entretien

Après chaque utilisation, la chaise Elexo doit être nettoyée à l'eau avec un produit d'entretien ménager courant. N'utilisez pas d'accessoires abrasifs ou de produits solvants agressifs. Vérifiez que les roues sont exemptes de cheveux, de traces de savon ou de poussières régulièrement et nettoyez-les le cas échéant.
Le plan d'entretien complet est repris dans le mode d'emploi (www.lopital.fr).

En cas de panne, adressez-vous à Lopital.
Tél: +31 (0)13 - 5239300, **Fax:** +31 (0)13 - 5239301
E-mail: service@lopital.nl

Mode d'emploi

Retrouvez l'ensemble des modes d'emploi sur : www.lopital.fr