



# Golvo 8000 / 8008

## Instructiekaart

Nederlands

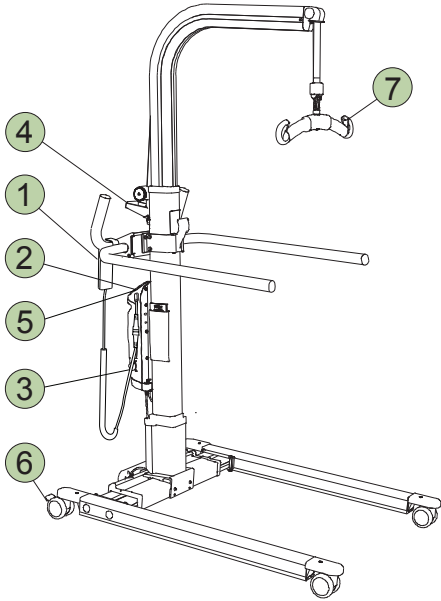

### 1 Handbediening

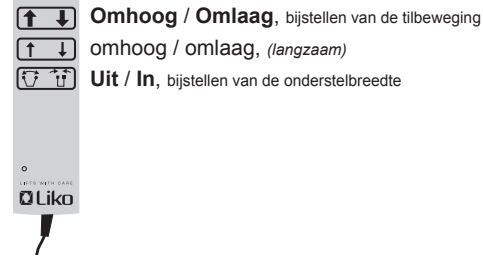


Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

### 2 Bedieningspaneel



Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

### 3 Noodstopshakelaar

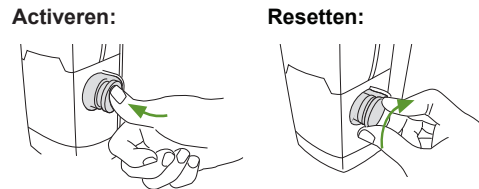


### 4 Mechanische nooddaalfunctie




Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.


### 5 Elektrische nooddaal-/hef-functie

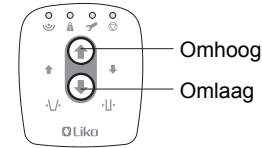


### 6 Vergrendeling van de wielen

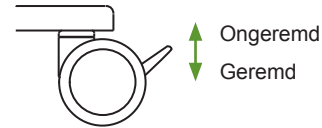

### 7 Veiligheidsclips

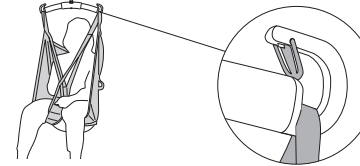


### Schuin tillen moet worden vermeden!

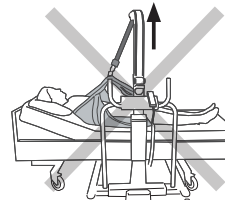

**Het tillen vanuit een schuine hoek kan ertoe leiden dat de lift kantelt!**

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

### Laden van de batterijen

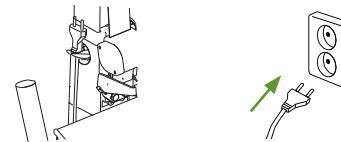

- Houd het voor gewoonte om de batterijen na gebruik te laden.
- Tijdens het laden werkt de lift niet.
- **De lift kan niet worden opgeladen met ingedrukte noodstopknop.**

### Ergonomie

- Niet met de hand tillen – laat de lift het werk doen.
- Haast niet – werk rustig en methodisch.
- Spaar uw rug – werk in staande houding met een rechte rug.
- Maak gebruik van de functie voor verhoging/verlaging van het bed.
- Gebruik uw kracht op correcte wijze – sta dichtbij.

### Reiniging

Indien nodig kan de lift worden gereinigd door deze met een vochtige doek met warm water of reinigingalcohol schoon te vegen.

### Vereenvoudigd storingzoeken

#### Controleer:

- of de noodstop soms is ingedrukt, zie ③
- of de accu van de lift opgeladen is
- of het oplaadsnoer niet is aangesloten op een stopcontact.

### Overige instructiekaarten

De instructiekaarten voor Liko patiëntenliften en tilbanden kunnen worden gedownload bij [www.liko.com](http://www.liko.com).

© Copyright Liko AB



Intertek



A Hill-Rom Company

[www.liko.com](http://www.liko.com)

#### Fabrikant:

Liko AB  
SE-975 92 Luleå  
Sweden  
[info@liko.se](mailto:info@liko.se)

### Veiligheidsvoorschriften

- Lees de gebruiksaanwijzing van de patiëntenlift en de tilaccessoires vóór gebruik zorgvuldig door.
- Zorg voor een goede planning van het tilmoment.
- Voordat de gebruiker wordt opgetild, is het van belang om te controleren of de lussen goed aan het tiljuk zijn vastgehaakt.
- **Maximale belasting: 200 kg**

Voor behoud van de max. belasting zijn ook accessoires vereist die voor een gelijke belasting of hoger geschikt zijn.

### BELANGRIJK!

Deze instructiekaart mag niet worden gezien als een vervanging van de normale gebruiksaanwijzing van de lift. Deze kan worden gedownload bij [www.liko.com](http://www.liko.com).