



Periodiek preventief
onderhoud en inspectie
Beknopt onderhoudsprotocol

Flexo Douche-Toilet stoel

Flexo Douche-Toilet stoel

51005199 (Standaard)



Inhoudsopgave

Introductie.....	3
Onderhoudsprotocol voor zorgverlener.....	4
Onderhoudsprotocol technische dienst/inspecteur/monteur	5

Fabrikant

Lopital Nederland B.V.

Laarakkerweg 9

5061 JR Nederland

T (0031) 13 52 39 300

F (0031) 13 52 39 301

www.lopital.com

E-mail algemeen: info@lopital.nl

E-mail service: service@lopital.nl

Introductie

Periodiek preventief onderhoud en inspectie

Om de Flexo in optimale conditie te houden, is het noodzakelijk om op de aangegeven momenten de volgende maatregelen uit te voeren.

De Flexo moet volgens het bijgeleverde onderhoudsschema onderhouden worden en minimaal 1 keer per jaar worden geïnspecteerd.

Reparaties en onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door hiertoe aantoonbaar vakbekwame en specifiek opgeleide personen die goed bekend zijn met ontwerp, gebruik en verzorging van het product. Reparaties en onderhoud dienen te worden uitgevoerd met originele Lopital reserveonderdelen.

Het aanbrengen van wijzigingen aan de constructie kan de veiligheid van de Flexo aantasten. Bovendien vervallen hiermee de aansprakelijkheid en garantievoorwaarden van Lopital. De Flexo voldoet hierdoor niet meer aan de richtlijn voor medische hulpmiddelen (93/42/EEG) / verordening medische hulpmiddelen (MDR (EU) 2017/745).

Alle werkzaamheden aan de Flexo dienen te worden genoteerd in een logboek.



Onderhoudsprotocol voor zorgverlener

Preventief onderhoud uitgevoerd door zorgverlener

De Flexo dient na ieder gebruik gereinigd te worden met water en normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen. PUR integraal schuimdelen met IMC coating worden bij voorkeur d.m.v. wrijven gereinigd en gedesinfecteerd. Gebruik hiervoor geen schuurmiddel of andere agressieve oplosmiddelen. Indien nodig kunnen PUR delen met een oplossing van 70% ethanol of propanol gedesinfecteerd worden.

De inwerktijd van de middelen hebben een significante invloed op de levensduur van de PUR delen. Vanwege de materiaaleigenschappen van PUR moet contact met scherpe voorwerpen worden vermeden. Dit kan leiden tot beschadiging of scheurvorming in het materiaal. Tenslotte wijzen wij u erop dat ook niet kritieke delen van de PUR delen gereinigd en gedesinfecteerd moeten worden.

Controleer regelmatig de wielen op haren, stof en zeepresten en verwijder deze waar nodig. Onderhoud en reparatie aan de Flexo zijn alleen uit te voeren door daartoe bevoegd personeel.

Onderhoudsschema	
Na ieder gebruik	<ul style="list-style-type: none"> • Stoel reinigen met water en normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen. • PUR integrale schuimdelen reinigen en desinfecteren. • Controleren of alle onderdelen van de Flexo aanwezig zijn, zoals de voetensteun en inlegstuk van de zitting.
Wekelijks	<ul style="list-style-type: none"> • Frame reinigen. • Wielen controleren op haren, stof en zeepresten en verwijderen waar nodig. • Controleren of de werking van de stoel nog goed is. • Controleer de vergrendeling van de armlegger.
Jaarlijks	<ul style="list-style-type: none"> • Volgens de verordening medische hulpmiddelen moet een stoel volgens de richtlijnen van de producent onderhouden worden. Bij voorkeur dient dit te worden gedaan door Lopital. Lopital biedt de mogelijkheid om de stoel 1 keer per jaar grondig te inspecteren en onderhouden, middels het Periodiek Preventief Onderhoud. <p>Voor meer informatie over het onderhoudscontract kunt u contact opnemen met Lopital (service@lopital.nl) of met uw leverancier.</p>



Onderhoudsprotocol technische dienst/inspecteur/monteur

Preventief onderhoud en inspectie moet worden uitgevoerd volgens onderstaand protocol.

Om letsel en/of een onveilig hulpmiddel te voorkomen, moet het onderhoud met de juiste regelmaat worden uitgevoerd door hiertoe aantoonbaar vakbekwame en specifiek opgeleide personen die goed bekend zijn met ontwerp, gebruik en verzorging van het product, die de hiervoor bestemde gereedschappen en onderdelen gebruiken en over kennis van de geldende onderhoudsprocedures beschikken.

• = Controleren S = Smeren A = Aanbevolen vervanging (of delen vervangen) V = Vervangen (of delen vervangen) R = Reinigen

Maand	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Algehele staat - Controleer of het logboek en gebruikershandleiding aanwezig zijn. - Controleer of de stickers leesbaar zijn. - Controleer de stoel op beschadigingen / roestvorming. - Controleer of alle schroeven aanwezig zijn en vast zitten. - Controleer of het pomppedaal goed vast zit en of het pedaalrubber goed zit. - Stoelen van voor 2006 zijn uitgerust met een vaste scharnierpen met asborging. Deze moet altijd vervangen worden door een schroefdeel! (art.nr. 70519926)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PUR - Controleer het pur op verkleuring/beschadiging. Bij beschadiging altijd vervangen.	•	•	•	•	A	•	•	•	•	A
Balg - Controleer de balg op beschadiging.	•	•	A	•	•	A	•	•	A	•
Wielen - Controleer de wielbevestiging, vrijloop en remmen. - Controleer of alle 4 de wielen het grondvlak raken. - Controleer of het remlijpje intact is. - Controleer het loopvlak. (Versie van voor 2014 upgraden d.m.v. beschermdop op wielprop en behandelen eventuele roestvorming.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Armlegger/Voorsluiting - Controleer de armleggers op werking, beschadiging, roestvorming en speling. - Staan de armleggers evenwijdig? - RVS (A2) bouten en M8x16 Zincflake bouten altijd vervangen door Super duplex 4529 bouten (Lopital art.nr. 75005640), als deze nog niet zijn toegepast.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stoeldrager/onderstel scharnierpunt - Als de stoel niet meer soepel omhoog en omlaag geldt, vervang dan de klembussen, bouten en lagers.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Voetensteun - Controleer de voetensteun op beschadigingen en werking. - Zit de voetplaat nog goed gemonteerd en is de voetplaatdop aanwezig? - Bij stoelen van vóór juli 2017 : Bout (M4x10) onder voetplaten controleren en vervangen als het RVS bouten zijn.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•