



# Periodiek preventief onderhoud en inspectie

Beknopt onderhoudsprotocol

Lotus Opstahulp

# Lotus Opstahulp

59008100 (Standaard)



## Inhoudsopgave

Introductie.....	3
Onderhoudsschema voor zorgverlener .....	4
Onderhoudsschema voor technische dienst/inspecteur/monteur.....	5

### Fabrikant

Lopital Nederland B.V.  
Laarakkerweg 9  
5061 JR Nederland  
T (0031) 13 52 39 300  
F (0031) 13 52 39 301  
[www.lopital.com](http://www.lopital.com)  
E-mail algemeen: [info@lopital.nl](mailto:info@lopital.nl)  
E-mail service: [service@lopital.nl](mailto:service@lopital.nl)

# Introductie

## Periodiek preventief onderhoud en inspectie

Om de Lotus in optimale conditie te houden, is het noodzakelijk om op de aangegeven momenten de volgende maatregelen uit te voeren.

De Lotus moet volgens het bijgeleverde onderhoudsschema onderhouden worden en minimaal 1 keer per jaar worden geïnspecteerd.

Reparaties en onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door hiertoe aantoonbaar vakbekwame en specifiek opgeleide personen die goed bekend zijn met ontwerp, gebruik en verzorging van het product. Reparaties en onderhoud dienen te worden uitgevoerd met originele Lopital reserveonderdelen.

Het aanbrengen van wijzigingen aan de constructie kan de veiligheid van de Lotus aantasten. Bovendien vervallen hiermee de aansprakelijkheid en garantievoorwaarden van Lopital. De Lotus voldoet hierdoor niet meer aan de richtlijn voor medische hulpmiddelen (93/42/EEG).

Alle werkzaamheden aan de Lotus dienen te worden genoteerd in een logboek.



## Onderhoudsschema voor zorgverlener

*Preventief onderhoud uitgevoerd door zorgverlener*

De Lotus dient na ieder gebruik gereinigd te worden met water en normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen. PUR integraal schuimdelen met IMC coating worden bij voorkeur d.m.v. wrijven gereinigd en gedesinfecteerd. Gebruik hiervoor geen schuurmiddel of andere agressieve oplosmiddelen. Indien nodig kunnen PUR delen met een oplossing van 70% ethanol of propanol gedesinfecteerd worden.

De inwerktijd van de middelen hebben een significante invloed op de levensduur van de PUR delen. Vanwege de materiaaleigenschappen van PUR moet contact met scherpe voorwerpen worden vermeden. Dit kan leiden tot beschadiging of scheurvorming in het materiaal. Tenslotte wijzen wij u erop dat ook niet kritieke delen van de PUR delen gereinigd en gedesinfecteerd moeten worden.

Controleer regelmatig de wielen op haren, stof en zeepresten en verwijder deze waar nodig. Onderhoud en reparatie aan de Lotus zijn alleen uit te voeren door daartoe bevoegd personeel.

Onderhoudsschema	
Na ieder gebruik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lotus reinigen met water en normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen.</li> <li>• PUR integrale schuimdelen reinigen en desinfecteren.</li> </ul>
Wekelijks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frame reinigen.</li> <li>• Wielen controleren op haren, stof en zeepresten en verwijderen waar nodig.</li> <li>• Controleren of de werking van de Lotus nog goed is.</li> </ul>
Jaarlijks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volgens de richtlijn medische hulpmiddelen moet de Lotus volgens de richtlijnen van de producent onderhouden worden. Deze richtlijnen zijn te vinden op de volgende pagina.</li> </ul>

## Onderhoudsschema voor technische dienst/inspecteur/monteur

*Preventief onderhoud en inspectie moet worden uitgevoerd volgens onderstaand protocol.*

Om letsel en/of een onveilig hulpmiddel te voorkomen, moet het onderhoud met de juiste regelmaat worden uitgevoerd door hiertoe aantoonbaar vakbekwame en specifiek opgeleide personen die goed bekend zijn met ontwerp, gebruik en verzorging van het product, die de hiervoor bestemde gereedschappen en onderdelen gebruiken en over kennis van de geldende onderhoudsprocedures beschikken.

• = Controleren S = Smeren A = Aanbevolen vervanging (of delen vervangen) V = Vervangen (of delen vervangen) R = Reinigen

Maand	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Algehele staat										
- Controleer of het logboek en gebruikershandleiding aanwezig zijn.										
- Controleer of de stickers leesbaar zijn.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
- Controleer de Lotus op beschadigingen / roestvorming.										
- Controleer de bevestiging van de beensteunen.										
- Controleer of alle schroeven aanwezig zijn en vast zitten.										
PUR										
- Controleer het pur op verkleuring/beschadiging.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bij beschadiging altijd vervangen.										
Wielen										
- Controleer de voetplaat op beschadigingen.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Voetplaat										
- Controleer op beschadigingen.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bij breuken of scheuren altijd vervangen.										
Zitschalen										
- Controleer de zitschalen op beschadigingen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
- Zitten de zitschalen nog goed gemonteerd en staan ze gelijk?										
Pootspreiding										
- Controleer de pootspreiding.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
- Controleer de kogellagers.										
- Werkt de pootspreiding zoals bedoeld?										