



Periodiek preventief
onderhoud en inspectie
Beknopt onderhoudsprotocol

Reflex Douche- Toiletstoel

Reflex Douche/Toilet stoel

21005600 (Standaard)
 51005605 (Met Flexo voetensteun)
 51005610 (Kindermodel)
 51005611 (Kindermodel)
 51005612 (Kindermodel)



Inhoudsopgave

Introductie.....	3
Onderhoudsschema voor zorgverlener	4
Onderhoudsschema voor technische dienst/inspecteur/monteur.....	5

Fabrikant

Lopital Nederland B.V.
 Laarakkerweg 9
 5061 JR Nederland
 T (0031) 13 52 39 300
 F (0031) 13 52 39 301
www.lopital.com
 E-mail algemeen: info@lopital.nl
 E-mail service: service@lopital.nl

Introductie

Periodiek preventief onderhoud en inspectie



Om de Reflex in optimale conditie te houden, is het noodzakelijk om op de aangegeven momenten de volgende maatregelen uit te voeren.

De Reflex moet volgens het bijgeleverde onderhoudsschema onderhouden worden en minimaal 1 keer per jaar worden geïnspecteerd.

Reparaties en onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door hiertoe aantoonbaar vakbekwame en specifiek opgeleide personen die goed bekend zijn met ontwerp, gebruik en verzorging van het product. Reparaties en onderhoud dienen te worden uitgevoerd met originele Lopital reserveonderdelen.

Het aanbrengen van wijzigingen aan de constructie kan de veiligheid van de Reflex aantasten. Bovendien vervallen hiermee de aansprakelijkheid en garantievoorzwaarden van Lopital. De Reflex voldoet hierdoor niet meer aan de richtlijn voor medische hulpmiddelen (93/42/EEG) / verordening medische hulpmiddelen (MDR (EU) 2017/745).

Alle werkzaamheden aan de Reflex dienen te worden genoteerd in een logboek.

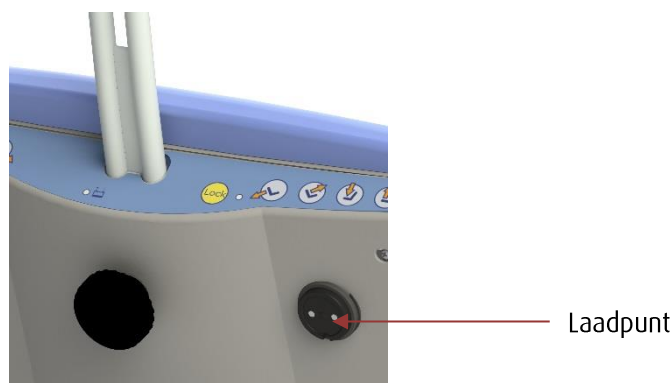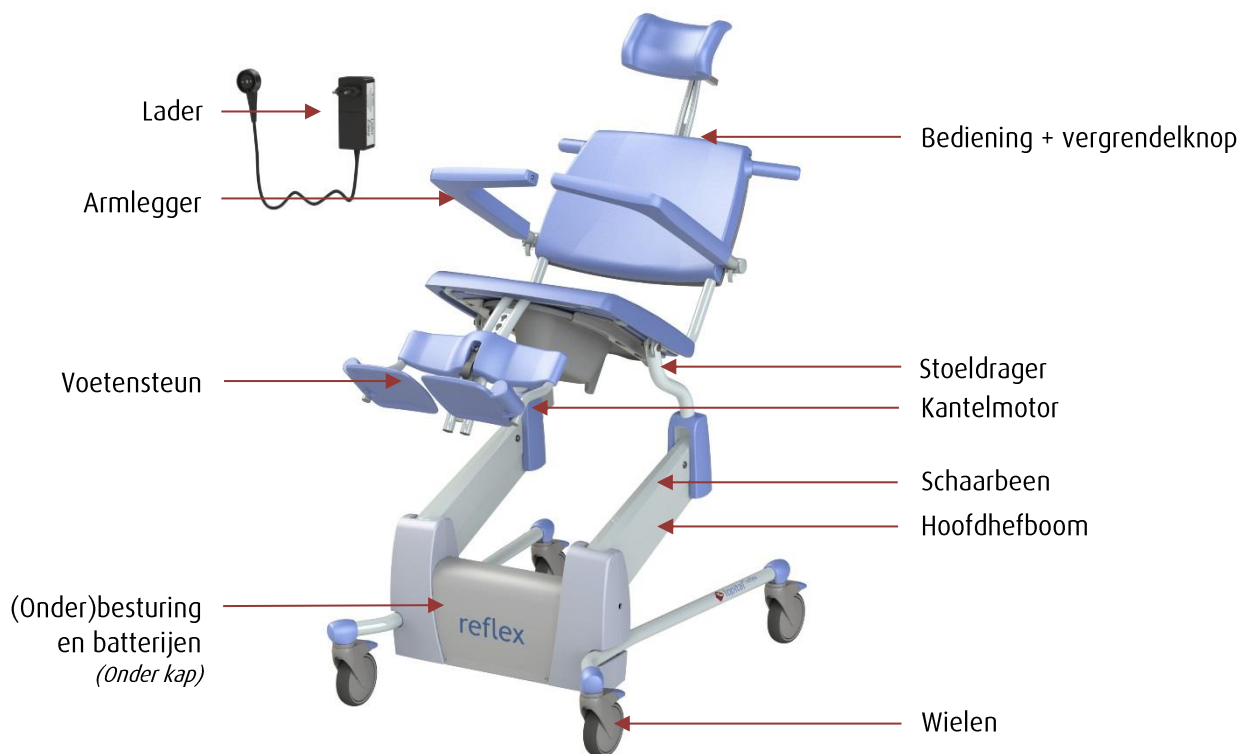

Onderhoudsschema voor zorgverlener

Preventief onderhoud uitgevoerd door zorgverlener

De Reflex dient na ieder gebruik gereinigd te worden met water en normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen. PUR integraal schuimdelen met IMC coating worden bij voorkeur d.m.v. wrijven gereinigd en gedesinfecteerd. Gebruik hiervoor geen schuurmiddel of andere agressieve oplosmiddelen. Indien nodig kunnen PUR delen met een oplossing van 70% ethanol of propanol gedesinfecteerd worden.

De inwerktijd van de middelen hebben een significante invloed op de levensduur van de PUR delen. Vanwege de materiaaleigenschappen van PUR moet contact met scherpe voorwerpen worden vermeden. Dit kan leiden tot beschadiging of scheurvorming in het materiaal. Tenslotte wijzen wij u erop dat ook niet kritieke delen van de PUR delen gereinigd en gedesinfecteerd moeten worden.

Controleer regelmatig de wielen op haren, stof en zeepresten en verwijder deze waar nodig. Onderhoud en reparatie aan de Reflex zijn alleen uit te voeren door daartoe bevoegd personeel.

Onderhoudsschema	
Na ieder gebruik	<ul style="list-style-type: none"> • Stoel reinigen met water en normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen. • PUR integrale schuimdelen reinigen en desinfecteren. • Controleren of alle onderdelen van de Reflex aanwezig zijn, zoals de voetensteun, hoofdondersteuning en inlegstuk van de zitting.
Wekelijks	<ul style="list-style-type: none"> • Frame reinigen. • Wielen controleren op haren, stof en zeepresten en verwijderen waar nodig. • Controleren of de werking van de stoel nog goed is. • Laad de batterij minimaal 1 keer per week op. • Controleer de vergrendeling van de armlegger.
Jaarlijks	<ul style="list-style-type: none"> • Volgens de verordening medische hulpmiddelen moet een stoel volgens de richtlijnen van de producent onderhouden worden. Bij voorkeur dient dit te worden gedaan door Lopital. Lopital biedt de mogelijkheid om de stoel 1 keer per jaar grondig te inspecteren en onderhouden, middels het Periodiek Preventief Onderhoud. <p>Voor meer informatie over het onderhoudscontract kunt u contact opnemen met Lopital (service@lopital.nl) of met uw leverancier.</p>



Onderhoudsschema voor technische dienst/inspecteur/monteur

Preventief onderhoud en inspectie moet worden uitgevoerd volgens onderstaand protocol.

Om letsel en/of een onveilig hulpmiddel te voorkomen, moet het onderhoud met de juiste regelmaat worden uitgevoerd door hiertoe aantoonbaar vakbekwame en specifiek opgeleide personen die goed bekend zijn met ontwerp, gebruik en verzorging van het product, die de hiervoor bestemde gereedschappen en onderdelen gebruiken en over kennis van de geldende onderhoudsprocedures beschikken.

• = Controleren S = Smeren A = Aanbevolen vervanging (of delen vervangen) V = Vervangen (of delen vervangen) R = Reinigen

Maand	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Algehele staat - Controleer of het logboek en gebruikershandleiding aanwezig zijn. - Controleer of de stickers leesbaar zijn. - Controleer de stoel op beschadigingen / roestvorming. - Controleer of alle schroeven aanwezig zijn en vast zitten.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PUR - Controleer het pur op verkleuring/beschadiging. Bij beschadiging altijd vervangen.	•	•	•	•	A	•	•	•	•	A
Bediening - Controleer de rugkap op scheuren en bevestiging, controleer het bedieningspaneel op beschadigingen, en controleer de knoppen en functies van de Reflex.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wielen - Controleer de wielbevestiging, vrijloop en remmen. - Controleer of alle 4 de wielen het grondvlak raken. - Controleer of het remlipje intact is. - Controleer het loopvlak. (Versie van voor 2014 upgraden d.m.v. beschermdop op wielprop en behandelen eventuele roestvorming.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Armlegger/Voorsluiting - Controleer de armleggers op werking, beschadiging, roestvorming en speling. - Staan de armleggers evenwijdig? - RVS (A2) bouten en M8x16 Zincflake bouten altijd vervangen door Super duplex 4529 bouten (Lopital art.nr. 75005640), als deze nog niet zijn toegepast.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stoeldrager/hefbomen - Controleer speling van de schaarbenen en hoofdhefbomen, bij excessieve speling dient het onderdeel te worden vervangen die de speling veroorzaakt. - Controleer de asborgringen (vanaf RFL080501099-CO). - Bouten boven in stoeldrager elke 2 jaar vervangen (geldt voor stoelen tot serienummer RFL080501099-CO).	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	V	•	V	•	V	•	V	•	V
Kantelmotor - Controleer de kantelmotor op beschadigingen en de controleer de bevestiging.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Voetensteun - Controleer de voetensteun op beschadigingen en werking. - Controleer of bij stoelen van vóór 2009 het hoesje van de spanhandel aanwezig is. - Zit de voetplaat nog goed gemonteerd en is de voetplaatdop aanwezig? - Bij stoelen van vóór juli 2017 : Bout (M4x10) onder voetplaten controleren en vervangen als het RVS bouten zijn.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Batterij - Controleer de siemens waarde van de batterijen.	•	•	A	•	•	A	•	•	A	•
Lader - De lader dient elk jaar getest te worden volgens de NEN 3140.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Scharnierpunt - Controleer en smeer de lager van de het scharnierpunt (stoeldrager/hoofdhefboom) - De lagers van de stoeldrager (stoeldrager/hoofdhefboom) elke 3 jaar vervangen.	S	S	V	S	S	V	S	S	V	S
Besturing - De onderbesturing van de Reflex dient elk jaar tijdens het onderhoud grondig gereinigd te worden (met name de aansluitpunten).	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R