



Periodiek preventief
onderhoud en inspectie

Beknopt onderhoudsprotocol

Tango XL Douche-Toilet stoel

Tango XL Douche/Toilet stoel

51005705



Inhoudsopgave

Introductie.....	3
Onderhoudsschema voor zorgverlener	4
Onderhoudsschema voor technische dienst/inspecteur/monteur.....	5

Fabrikant

Lopital Nederland B.V.
Laarakkerweg 9
5061 JR Nederland
T (0031) 13 52 39 300
F (0031) 13 52 39 301
www.lopital.com
E-mail algemeen: info@lopital.nl
E-mail service: service@lopital.nl

Introductie

Periodiek preventief onderhoud en inspectie

Om de Tango XL in optimale conditie te houden, is het noodzakelijk om op de aangegeven momenten de volgende maatregelen uit te voeren.

De Tango XL moet volgens het bijgeleverde onderhoudsschema onderhouden worden en minimaal 1 keer per jaar worden geïnspecteerd.

Reparaties en onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door hiertoe aantoonbaar vakbekwame en specifiek opgeleide personen die goed bekend zijn met ontwerp, gebruik en verzorging van het product. Reparaties en onderhoud dienen te worden uitgevoerd met originele Lopital reserveonderdelen.

Het aanbrengen van wijzigingen aan de constructie kan de veiligheid van de Tango XL aantasten. Bovendien vervallen hiermee de aansprakelijkheid en garantievoorwaarden van Lopital. De Tango XL voldoet hierdoor niet meer aan de richtlijn voor medische hulpmiddelen (93/42/EEG).

Alle werkzaamheden aan de Tango XL dienen te worden genoteerd in een logboek.



Onderhoudsschema voor zorgverlener

Preventief onderhoud uitgevoerd door zorgverlener

De Tango XL dient na ieder gebruik gereinigd te worden met water en normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen. PUR integraal schuimdelen met IMC coating worden bij voorkeur d.m.v. wrijven gereinigd en gedesinfecteerd. Gebruik hiervoor geen schuurmiddel of andere agressieve oplosmiddelen. Indien nodig kunnen PUR delen met een oplossing van 70% ethanol of propanol gedesinfecteerd worden.

De inwerktijd van de middelen hebben een significante invloed op de levensduur van de PUR delen. Vanwege de materiaaleigenschappen van PUR moet contact met scherpe voorwerpen worden vermeden. Dit kan leiden tot beschadiging of scheurvorming in het materiaal. Tenslotte wijzen wij u erop dat ook niet kritieke delen van de PUR delen gereinigd en gedesinfecteerd moeten worden.

Controleer regelmatig de wielen op haren, stof en zeepresten en verwijder deze waar nodig. Onderhoud en reparatie aan de Tango XL zijn alleen uit te voeren door daartoe bevoegd personeel.

Onderhoudsschema	
Na ieder gebruik	<ul style="list-style-type: none"> • Stoel reinigen met water en normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen. • PUR integrale schuimdelen reinigen en desinfecteren. • Controleren of alle onderdelen van de Tango XL aanwezig zijn, zoals de voetsteunen.
Wekelijks	<ul style="list-style-type: none"> • Frame reinigen. • Wielen controleren op haren, stof en zeepresten en verwijderen waar nodig. • Controleren of de werking van de stoel nog goed is.
Jaarlijks	<ul style="list-style-type: none"> • Volgens de richtlijn medische hulpmiddelen moet een stoel volgens de richtlijnen van de producent onderhouden worden. Deze richtlijnen zijn te vinden op de volgende pagina.

Onderhoudsschema voor technische dienst/inspecteur/monteur

Preventief onderhoud en inspectie moet worden uitgevoerd volgens onderstaand protocol.

Om letsel en/of een onveilig hulpmiddel te voorkomen, moet het onderhoud met de juiste regelmaat worden uitgevoerd door hiertoe aantoonbaar vakbekwame en specifiek opgeleide personen die goed bekend zijn met ontwerp, gebruik en verzorging van het product, die de hiervoor bestemde gereedschappen en onderdelen gebruiken en over kennis van de geldende onderhoudsprocedures beschikken.

• = Controleren S = Smeren A = Aanbevolen vervanging (of delen vervangen) V = Vervangen (of delen vervangen) R = Reinigen

Maand	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Algehele staat - Controleer of het logboek en gebruikershandleiding aanwezig zijn. - Controleer of de stickers leesbaar zijn. - Controleer de stoel op beschadigingen / roestvorming. - Controleer of alle schroeven aanwezig zijn en vast zitten.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PUR - Controleer het pur op verkleuring/beschadiging. Bij beschadiging altijd vervangen.	•	•	•	•	A	•	•	•	•	A
Wielen - Controleer de wielbevestiging, vrijloop en remmen. - Controleer of alle 4 de wielen het grondvlak raken. - Controleer of het remlijpje intact is. - Controleer het loopvlak. - Controleer de werking van het richtingswiel.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Armlegger - Controleer de armleggers op werking, beschadiging, roestvorming en speling. - Staan de armleggers evenwijdig?	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Voetensteun - Controleer de voetensteun op beschadigingen en werking. - Het is aan te bevelen de voetplaten elke 5 jaar te vervangen. - Controleer of de verstelling nog op de juiste manier werkt en er geen beschadigingen zijn.	•	•	•	•	A	•	•	•	•	A