



Periodiek preventief  
onderhoud en inspectie

Beknopt onderhoudsprotocol

Timo/Cleo Douche(-Toilet) stoel

## Timo/Cleo Douche(-Toilet) stoel



5400 6030  
Douchestoel  
Timo verrijdbaar



5400 6034  
Douche-toiletstoel  
Timo verrijdbaar



5400 6035  
Douchestoel  
Timo verrijdbaar met  
voetensteun



5400 6035  
Douche-toiletstoel  
Timo verrijdbaar met  
voetensteun



5400 6020  
Douchestoel  
Timo



5400 6021  
Douche-toiletstoel  
Timo



5400 6040  
Douchestoel  
Cleo zelfrijder



5400 6035  
Douche-toiletstoel  
Cleo zelfrijder

## Inhoudsopgave

Introductie.....	3
Onderhoudsschema voor zorgverlener .....	4
Onderhoudsschema voor technische dienst/inspecteur/monteur.....	5

### Fabrikant

Lopital Nederland B.V.

Laarakkerweg 9

5061 JR Nederland

T (0031) 13 52 39 300

F (0031) 13 52 39 301

[www.lopital.com](http://www.lopital.com)

E-mail algemeen: [info@lopital.nl](mailto:info@lopital.nl)

E-mail service: [service@lopital.nl](mailto:service@lopital.nl)

## Introductie

### Periodiek preventief onderhoud en inspectie

Om de Timo/Cleo in optimale conditie te houden, is het noodzakelijk om op de aangegeven momenten de volgende maatregelen uit te voeren.

De Timo/Cleo moet volgens het bijgeleverde onderhoudsschema onderhouden worden en minimaal 1 keer per jaar worden geïnspecteerd.

Reparaties en onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door hiertoe aantoonbaar vakbekwame en specifiek opgeleide personen die goed bekend zijn met ontwerp, gebruik en verzorging van het product. Reparaties en onderhoud dienen te worden uitgevoerd met originele Lopital reserveonderdelen.

Het aanbrengen van wijzigingen aan de constructie kan de veiligheid van de Timo/Cleo aantasten. Bovendien vervallen hiermee de aansprakelijkheid en garantievoorwaarden van Lopital. De Timo/Cleo voldoet hierdoor niet meer aan de richtlijn voor medische hulpmiddelen (93/42/EEG).

Alle werkzaamheden aan de Timo/Cleo dienen te worden genoteerd in een logboek.



## Onderhoudsschema voor zorgverlener

*Preventief onderhoud uitgevoerd door zorgverlener*

De Timo/Cleo dient na ieder gebruik gereinigd te worden met water en normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen. PUR integraal schuimdelen met IMC coating worden bij voorkeur d.m.v. wrijven gereinigd en gedesinfecteerd. Gebruik hiervoor geen schuurmiddel of andere agressieve oplosmiddelen. Indien nodig kunnen PUR delen met een oplossing van 70% ethanol of propanol gedesinfecteerd worden.

De inwerktijd van de middelen hebben een significante invloed op de levensduur van de PUR delen. Vanwege de materiaaleigenschappen van PUR moet contact met scherpe voorwerpen worden vermeden. Dit kan leiden tot beschadiging of scheurvorming in het materiaal. Tenslotte wijzen wij u erop dat ook niet kritieke delen van de PUR delen gereinigd en gedesinfecteerd moeten worden.

Controleer regelmatig de wielen op haren, stof en zeepresten en verwijder deze waar nodig. Onderhoud en reparatie aan de Tango zijn alleen uit te voeren door daartoe bevoegd personeel.

Onderhoudsschema	
Na ieder gebruik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stoel reinigen met water en normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen.</li> <li>• PUR integrale schuimdelen reinigen en desinfecteren.</li> <li>• Controleren of alle onderdelen van de Timo aanwezig zijn, zoals de voetensteunen.</li> </ul>
Wekelijks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frame reinigen.</li> <li>• Wielen controleren op haren, stof en zeepresten en verwijderen waar nodig.</li> <li>• Controleren of de werking van de stoel nog goed is.</li> </ul>
Jaarlijks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volgens de richtlijn medische hulpmiddelen moet een stoel volgens de richtlijnen van de producent onderhouden worden. Deze richtlijnen zijn te vinden op de volgende pagina.</li> </ul>

## Onderhoudsschema voor technische dienst/inspecteur/monteur

*Preventief onderhoud en inspectie moet worden uitgevoerd volgens onderstaand protocol.*

Om letsel en/of een onveilig hulpmiddel te voorkomen, moet het onderhoud met de juiste regelmaat worden uitgevoerd door hiertoe aantoonbaar vakbekwame en specifiek opgeleide personen die goed bekend zijn met ontwerp, gebruik en verzorging van het product, die de hiervoor bestemde gereedschappen en onderdelen gebruiken en over kennis van de geldende onderhoudsprocedures beschikken.

• = Controleren S = Smeren A = Aanbevolen vervanging (of delen vervangen) V = Vervangen (of delen vervangen) R = Reinigen

Maand	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
<b>Algehele staat</b> - Controleer of het logboek en gebruikershandleiding aanwezig zijn. - Controleer of de stickers leesbaar zijn. - Controleer de stoel op beschadigingen / roestvorming. - Controleer of alle schroeven aanwezig zijn en vast zitten.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>PUR</b> - Controleer het pur op verkleuring/beschadiging. Bij beschadiging altijd vervangen.	•	•	•	•	A	•	•	•	•	A
<b>Wielen</b> - Controleer de wielbevestiging, vrijloop en remmen. - Controleer of alle 4 de wielen het grondvlak raken. - Controleer of het remlipje intact is. - Controleer het loopvlak.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Armlegger</b> - Controleer de armleggers op werking, beschadiging, roestvorming en speling. - Staan de armleggers evenwijdig? - RVS (A2) bouten en M8x16 Zincflake bouten altijd vervangen door Super duplex 4529 bouten (Lopital art.nr. 75005640), als deze nog niet zijn toegepast.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Voetensteun</b> - Controleer de voetensteun op beschadigingen en werking. - Zit de voetplaat nog goed gemonteerd en is de voetplaatdop aanwezig? - Bij stoelen van vóór juli 2017 : Bout (M4x10) onder voetplaten controleren en vervangen als het RVS bouten zijn.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•