



Periodiek preventief
onderhoud en inspectie

Beknopt onderhoudsprotocol

Lotus Opstahulp

Lotus Opstahulp

59008100



Inhoudsopgave

Introductie.....	3
Onderhoudsschema voor technische medewerkers.....	4

Fabrikant

Lopital Nederland B.V.
Laarakkerweg 9
5061 JR Nederland
T (0031) 13 52 39 300
www.lopital.com
E-mail: info@lopital.nl

De door Lopital geproduceerde Lotus voldoet aan de volgende geldende normen: MDR (EU) 2017/745, NEN-EN-ISO 14971, NEN-EN 12182, ISO10535, IEC60529, IEC60601-1, IEC60601-1-2, IEC6060-1-6, IEC62366, CAN/CSA-C22.2 60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, UNI-CEI-EN-ISO 13485, NEN-EN-ISO 9001, NEN-EN-ISO 14001

Introductie

Periodiek preventief onderhoud en inspectie

Om de Lotus in optimale conditie te houden, is het noodzakelijk om op de aangegeven momenten de volgende maatregelen uit te voeren.

De Lotus moet volgens het bijgeleverde onderhoudsschema onderhouden worden en minimaal 1 keer per jaar worden geïnspecteerd.

Reparaties en onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door hiertoe aantoonbaar vakbekwame en specifiek opgeleide personen die goed bekend zijn met ontwerp, gebruik en verzorging van het product. Reparaties en onderhoud dienen te worden uitgevoerd met originele Lopital reserveonderdelen.

De gemiddelde technische levensduur van de Lotus is 10 jaar, mits dagelijks en periodiek onderhoud wordt uitgevoerd.

Het aanbrengen van wijzigingen aan de constructie kan de veiligheid van de Lotus aantasten. Bovendien vervallen hiermee de aansprakelijkheid en garantievoorwaarden van Lopital. De Lotus voldoet hierdoor niet meer aan de verordening medische hulpmiddelen MDR (EU) 2017/745.

Alle werkzaamheden aan de Lotus dienen te worden genoteerd in een logboek.



Onderhoudsschema voor technische medewerkers


Preventief onderhoud en inspectie moet worden uitgevoerd volgens onderstaand protocol.

Om letsel en/of een onveilig hulpmiddel te voorkomen, moet het onderhoud met de juiste regelmaat worden uitgevoerd door hiertoe aantoonbaar vakbekwame en specifiek opgeleide personen die goed bekend zijn met ontwerp, gebruik en verzorging van het product, die de hiervoor bestemde gereedschappen en onderdelen gebruiken en over kennis van de geldende onderhoudsprocedures beschikken. De Lotus dient minimaal 1 keer per jaar periodiek onderhouden en geïnspecteerd te worden. Het niet uitvoeren van jaarlijks onderhoud en inspectie kan leiden tot gevaarlijke situaties.


• = Controleren S = Smeren A = Aanbevolen vervanging (of delen vervangen) V = Vervangen (of delen vervangen)

Maand	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Algehele staat										
- Controleer of de gebruikershandleiding aanwezig is.										
- Controleer of de stickers leesbaar zijn.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
- Controleer de Lotus op beschadigingen / roestvorming.										
- Controleer de bevestiging van de beensteunen.										
- Controleer of alle schroeven aanwezig zijn en vast zitten.										
PUR										
- Controleer het pur op verkleuring/beschadiging. Bij beschadiging altijd vervangen.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wielen										
- Controleer de wielbevestiging, vrijloop en remmen.										
- Controleer of alle 4 de wielen het grondvlak raken.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
- Controleer of het remlijpje intact is.										
- Controleer het loopvlak.										
Voetplaat										
- Controleer de voetplaat op beschadigingen.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zitschalen										
- Controleer de zitschalen op beschadigingen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
- Zitten de zitschalen nog goed gemonteerd en staan ze gelijk?										
Pootspreiding										
- Controleer de pootspreiding.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
- Controleer de kogellagers.										
- Werkt de pootspreiding zoals bedoeld?										

Voor vragen over het onderhoudsprotocol raadpleeg Lopital (telefoon (0031) 13 52 39 300 of mail info@lopital.nl). U dient het serienummer (rood omrand) door te geven aan Lopital. Zie hiervoor de serienummersticker op het product.



Laarakkerweg 9
5061 JR Oisterwijk
The Netherlands
T: (+31)13-5239300

GTIN (01) 8720256103---


 (11) YYMMDD

SN (21) -----

CE
Weight: -- kg / -- lbs

 -- kg / -- LBS
Product type

Item no: -----





Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl

Lopital Nederland B.V. Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
Tel +31 (0)13 5239300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl



MAIN8100-01 05-2021