



Veiligheidsvoorschriften

- Lees vóór gebruik de gebruikershandleiding (www.lopital.nl).
- De maximale belasting is 300 kg.
- Zorg ervoor dat de stoel op de rem staat tijdens cliëntentransfers van en naar de stoel.
- Plaats de voeten op de voetsteunen.



Gebruik

1. Breng de stoel in de juiste positie en draai de voetsteunen weg.
2. Zet de stoel op de rem!
3. Klap indien nodig de armsteunen omhoog.
4. Ondersteun de persoon met beperking bij het gaan zitten.
5. Sluit de armsteunen en laat de voeten van de cliënt op de voetplaten rusten.


Opstaan gebeurt in omgekeerde volgorde.

Wielblokkering



1. Wielblokkering
2. Ontgrendelen

Richtings- / geremd wiel

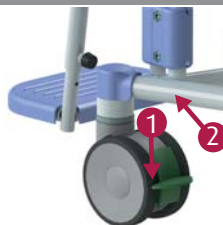

1. Wielblokkering
2. Ontgrendelen

Afneembare zitting

Indien gewenst is de zitting van de Tango XXL los van het frame te halen. Hierdoor is de zitting extra goed te reinigen. Er kan geen vuil tussen het frame en de zitting blijven zitten.



Voetensteun



Beide voetsteunen dienen weg gedraaid te zijn als de persoon met beperking op de stoel gaat zitten. Zorg ervoor dat de persoon met beperking met beide voeten op de voetplaten rust tijdens het verrijden.

Armsteun



1. Ontgrendelen
2. Naar achter draaien

Sluiten in omgekeerde volgorde.

Belangrijk!

Deze instructiekaart mag niet worden gezien als vervanging van de gebruikershandleiding!

Toiletfunctie

- *In combinatie met toilet:* De Tango XXL kan over bijna ieder toilet gereden worden.
- *Met ondersteek:* De Tango XXL kan ook als toiletstoel gebruikt worden. Schuif hiervoor de RVS / kunststof ondersteek in de geleider onder de stoel.

Reiniging en onderhoud

De Tango XXL dient na ieder gebruik gereinigd te worden met water en normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Gebruik hiervoor geen schuurmiddel of andere agressieve oplosmiddelen. Indien nodig kunnen PUR delen met een oplossing van 70% ethanol of propanol gedesinfecteerd worden. Het volledige onderhoudsschema en schoonmaakprotocol is te vinden in de gebruikershandleiding. (www.lopital.nl)

Volgens de verordening MDR (EU) 2017/745 voor medische hulpmiddelen moet de Tango XXL volgens de richtlijnen van de producent onderhouden worden. Het onderhoudsprotocol is te vinden op de website van Lopital (www.lopital.nl)

In geval van storing contact opnemen met Lopital.
Tel: +31 (0) 13-5239300
E-mail: info@lopital.nl

Gebruikershandleiding

Voor een uitgebreide gebruikershandleiding gaat u naar: www.lopital.nl

