


Viking™ M mobiele lift

Instructiekaart

Nederlands

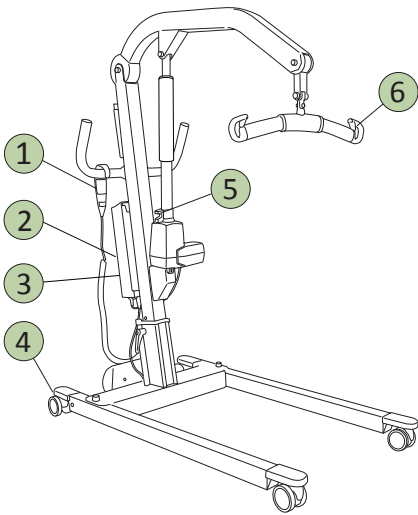

xxxxxx rev.1 NL_XX

Viking M Productnr. 2040045

Veiligheidsinstructies

⚠ Waarschuwing; deze situatie vereist extra zorg en aandacht.

- Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzingen voor zowel de lift als de liftaccessoires.
- Plan het tillen zorgvuldig.
- Controleer of de lussen van de tilband goed aan de haken van het tiljuk zijn bevestigd controleer dit bij volledig gestrekte banden, maar voordat de patiënt daadwerkelijk wordt opgetild.
- personeel dat de lift gebruikt moet bekend zijn met het juiste gebruik en de bediening van de lift.
- **Maximale belasting: 205 kg**

Om de lift maximaal te kunnen belasten moeten accessoires worden gebruikt die voor dezelfde of een hogere belasting zijn geclassificeerd.

Lees de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.


Deze instructiekaart is geen vervanging van de gebruiksaanwijzing van de lift 7NL137107.

1 Handbediening




Lees de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

2 Noodstop

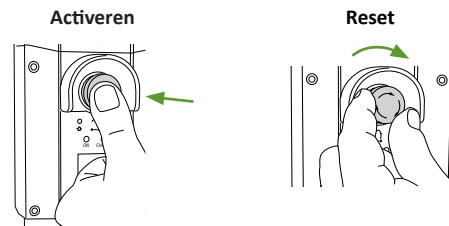


3 Elektrische nooddaal/hef-functie

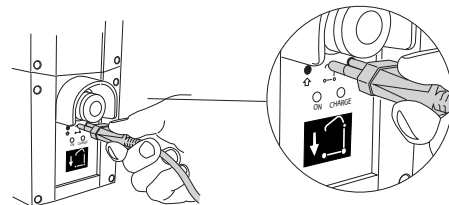


Opmerking! Gebruik geen scherp voorwerp omdat dit de controlbox kan beschadigen.


4 Vergrendeling van de wielen

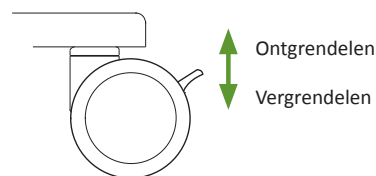


5 Mechanische nooddaalfunctie

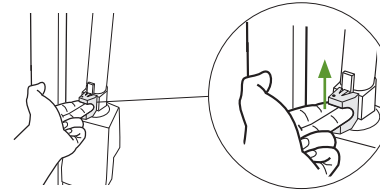

6 Veiligheidsclips

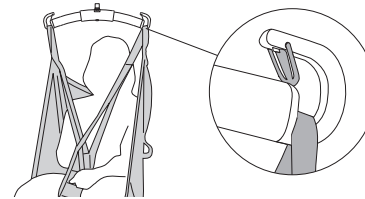


Opladen van de accu's

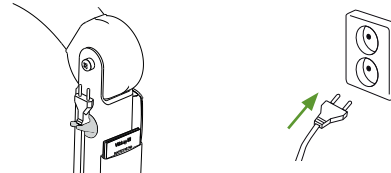

- Laad de lift regelmatig na gebruik op.
- De lift werkt niet tijdens het opladen.

Positie van de lift bij het tillen

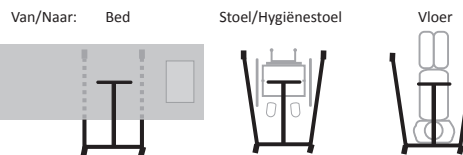

⚠ Door scheef tillen kan de lift kantelen!

Lees de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.



⚠ Beweeg de tilarm niet handmatig omhoog!



⚠ Verplaats de lift nooit door aan de hefstang te trekken!

Ergonomie

- Til nooit handmatig – laat de lift het werk doen.
- Werk rustig en systematisch.
- Belast uw rug niet verkeerd - werk zoals u loopt met een rechte rug.
- Gebruik de hef- en neerlaaf-functies van het bed.
- Verminder het hefboomeffect - werk dichtbij de patiënt en de lift.

Reiniging

Reinig de lift indien nodig met een vochtige doek, gebruik daarvoor warm water of een desinfecterend middel.

Lees de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

Vereenvoudigd storingzoeken

Controleer of:

- de noodstopknop niet is geactiveerd, zie 2.
- de accu is opgeladen.
- de oplaadkabel niet in het stopcontact steekt.

(C)2016. Liko R&D AB. All Rights Reserved.



www.hill-rom.com | www.liko.com

Liko AB
Nedre vägen 100
SE-975 92 Luleå, Sweden

Enhancing outcomes for patients and their caregivers.



7NL137505 rev. 1