

Instructiekaart

1

1. Verwijder het papier van de achterkant van de Wear&Care Strip.

2

2. Plaats de bovenkant van de Wear&Care Strip op de inco en vouw deze om de inco heen.

3

3. Plak de Wear&Care Strip in het midden van de inco.

Let op: Open het incontinentieverband niet

4

4. Openen: Druk op de rand en het uiteinde van de Wear&Care Sensor.

5

5. Plaatsen: Druk de Wear&Care Strip eerst in de twee gaten, daarna in het derde gat.

6

6. Sluiten: Wear&Care Sensor samendrukken en vergrendelen, je hoort een klik.

Opmerking: Groen lampje op sensor betekent dat de sensor op de strip correct is geplaatst

Overzicht Pictogrammen



Nieuwe inco geregistreerd. Systeem oké



Eerste urine geregistreerd. Geen actie nodig



Vol inco geregistreerd. Overweeg een verbandwissel



Maximale draagtijd bereikt. Overweeg een verbandwissel



Bewoner zonder sensor. **OPMERKING:** Geen registratie van het inco






Actie vereist. Zie het grijze pictogram en de tekst op het scherm voor de actie



Lage batterij. Plan het opladen van de sensor

Opmerking:

- » Het scherm updaten met goede mobiele dekking duurt doorgaans ½ - 2 minuten
- » Wanneer  op het scherm verschijnt en de inco is droog, kan dat komen doordat de inco samengedrukt is tijdens het urineren
- » Wanneer  op het scherm verschijnt en de inco is vol, dan kan het te wijten zijn aan een vertraging in het mobiele signaal of doordat de inco niet correct is aangebracht
- » Rood lampje verschijnt op gesloten Wear&Care sensor: laad sensor op
- » Indien  op het scherm verschijnt nadat het groene lampje op sensor heeft gebrand, controleer deksel/sluitmechanisme



Lopital Nederland B.V.
Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
Tel +31 (0)13.52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl



Lopital België B.V.
Antwerpsesteenweg 124, B-2630 Aartselaar
Tel +32 (0)3.870.51.60, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be

Scan naar
instructievideo's

