

Periodiek preventief
onderhoud en inspectie

Beknopt onderhoudsprotocol

Sirocco/Stylex/Amfora Douchebrancard
Vienna Aankleedtafel

Sirocco Douchebrancard

61002400 (elektrisch/ muurbevestiging links)
61002401 (elektrisch/ muurbevestiging rechts)



Stylex Douchebrancard

61003070 (hydraulisch/ standaard)



Amfora Douchebrancard

62004010 (hydraulisch/160)
62004011 (elektrisch/160)
62004015 (hydraulisch/190)
62004016 (elektrisch/190)



62005005 (elektrisch /160/muurbevestiging)
62005010 (elektrisch /190/muurbevestiging)



Vienna Aankleedtafel

62004020 (hydraulisch/160)
62004021 (elektrisch/160)
62004025 (hydraulisch/190)
62004026 (elektrisch/190)



65005015 (elektrisch /160/muurbevestiging)
65005020 (elektrisch /190/muurbevestiging)



Inhoudsopgave

Introductie.....	3
Onderhoudsschema voor technische medewerkers.....	6

Fabrikant

Lopital Nederland B.V.
Laarakkerweg 9
5061 JR Oisterwijk
Nederland
T (0031) 13 52 39 300
www.lopital.nl
E-mail: info@lopital.nl

Al de door Lopital geproduceerde hulpmiddelen voldoen aan de volgende geldende normen: MDR (EU) 2017/745, NEN-EN-ISO 14971, NEN-EN 12182, ISO17966, IEC60529, IEC60601-1, IEC60601-1-2, IEC60601-1-6, IEC62366, CAN/CSA-C22.2 60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, UNI-CEI-EN-ISO 13485, NEN-EN-ISO 9001, NEN-EN-ISO 14001

Introductie

Periodiek preventief onderhoud en inspectie

Om de douchebrancard/aankleedtafel in optimale conditie te houden, is het noodzakelijk om op de aangegeven momenten de volgende maatregelen uit te voeren.


De douchebrancard/aankleedtafel moet volgens het bijgeleverde onderhoudsschema onderhouden worden en minimaal 1 keer per jaar worden geïnspecteerd.



Reparaties en onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door hiertoe aantoonbaar vakbekwame en specifiek opgeleide personen die goed bekend zijn met ontwerp, gebruik en verzorging van het product. Reparaties en onderhoud dienen te worden uitgevoerd met originele Lopital reserveonderdelen.


De gemiddelde technische levensduur van de douchebrancard/aankleedtafel is 10 jaar, mits dagelijks en periodiek onderhoud wordt uitgevoerd.

Het aanbrengen van wijzigingen aan de constructie kan de veiligheid van de douchebrancard/aankleedtafel aantasten. Bovendien vervallen hiermee de aansprakelijkheid en garantievorwaarden van Lopital. De douchebrancard/aankleedtafel voldoet hierdoor niet meer aan de verordening voor medische hulpmiddelen MDR (EU) 2017/745.

Alle werkzaamheden aan de douchebrancard/aankleedtafel dienen te worden genoteerd in een logboek.

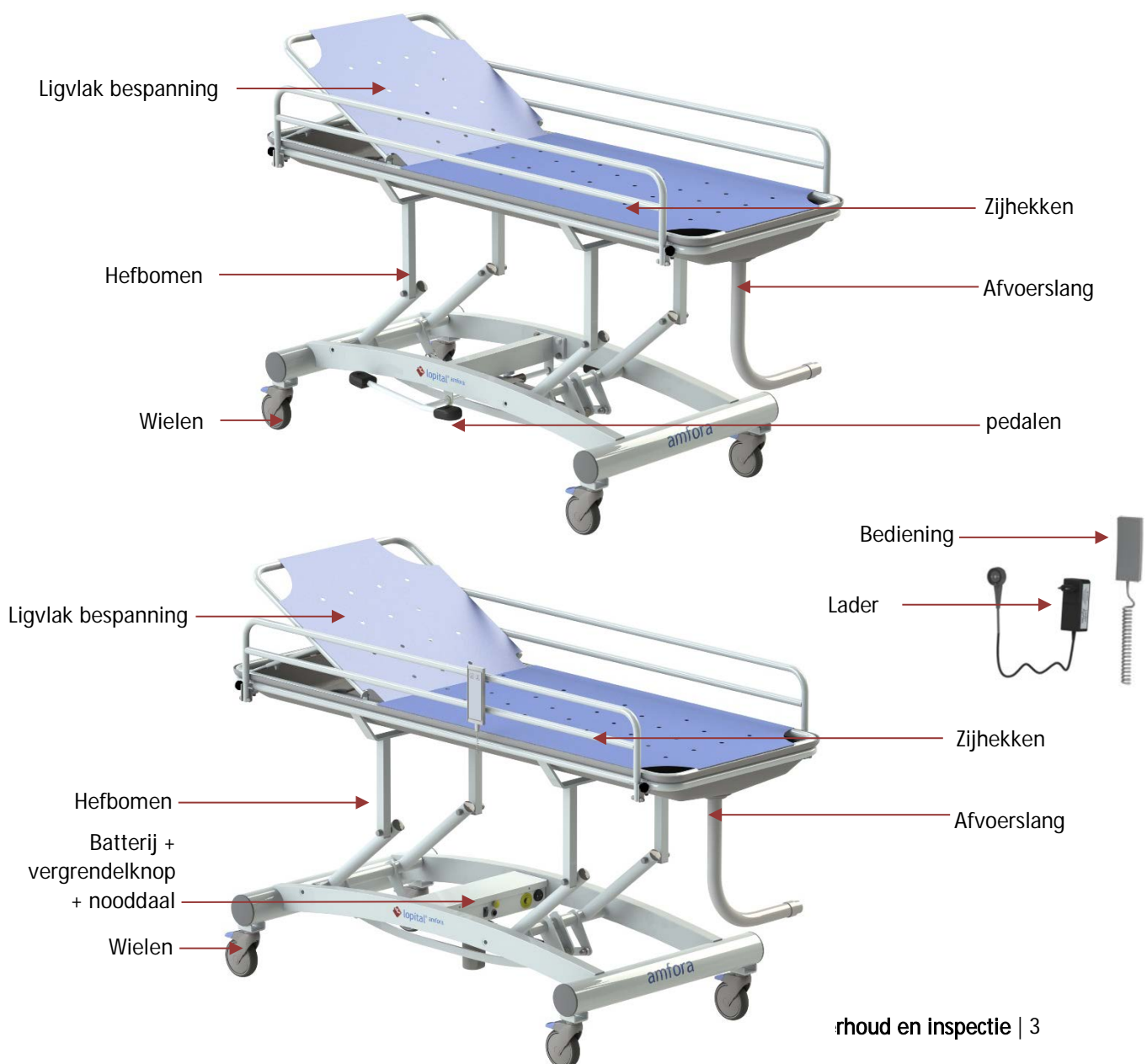

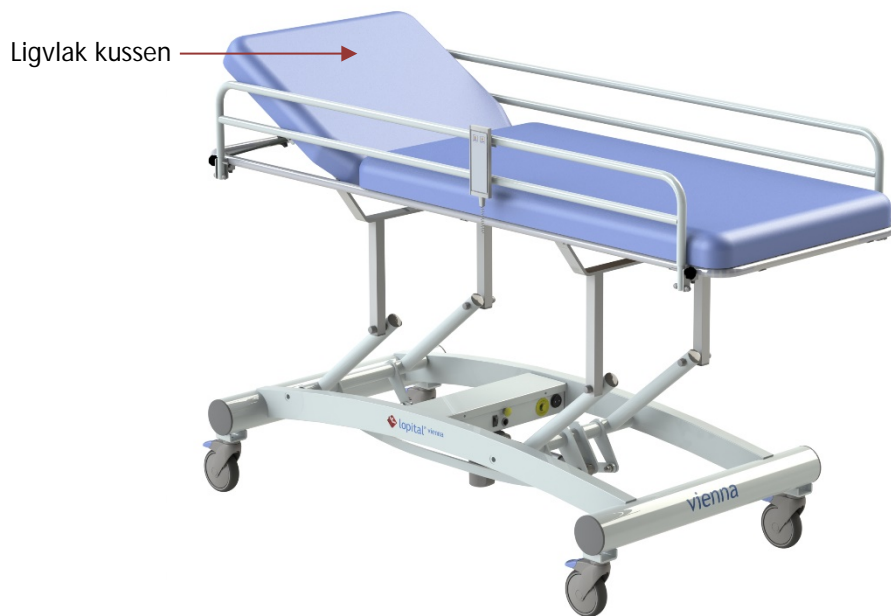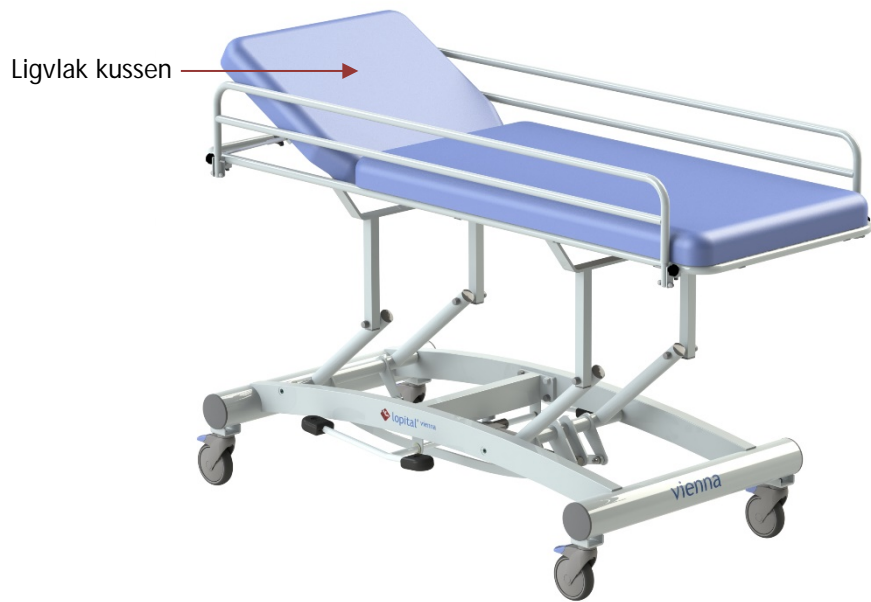

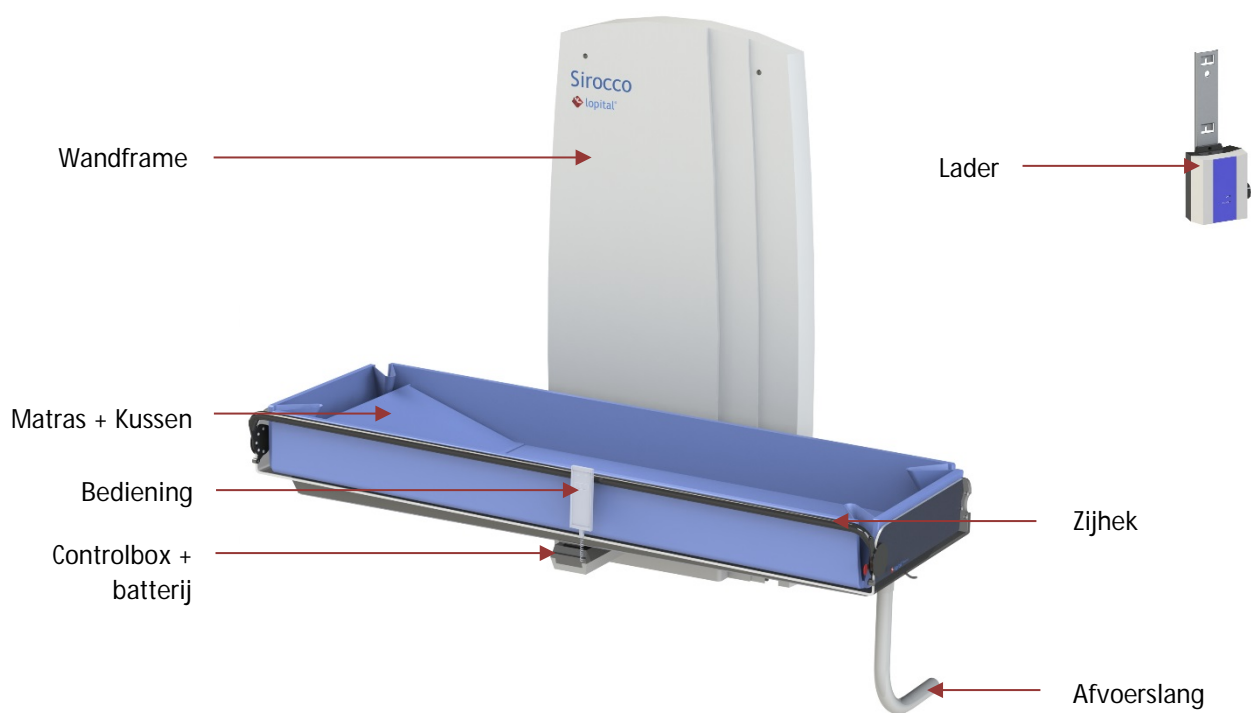

Onderhoudsschema voor technische medewerkers


Preventief onderhoud en inspectie moet worden uitgevoerd volgens onderstaand protocol.

Om letsel en/of een onveilig hulpmiddel te voorkomen, moet het onderhoud met de juiste regelmaat worden uitgevoerd door hiertoe aantoonbaar vakbekwame en specifiek opgeleide personen die goed bekend zijn met ontwerp, gebruik en verzorging van het product, die de hiervoor bestemde gereedschappen en onderdelen gebruiken en over kennis van de geldende onderhoudsprocedures beschikken. De douchebrancard/aankleedtafel dient minimaal 1 keer per jaar periodiek onderhouden en geïnspecteerd te worden. Het niet uitvoeren van jaarlijks onderhoud en inspectie kan leiden tot gevaarlijke situaties.


• = Controleren S = Smeren A = Aanbevolen vervanging (of delen vervangen) V = Vervangen (of delen vervangen)

Maand	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Algehele staat - Controleer of de gebruikershandleiding aanwezig is. - Controleer of de stickers leesbaar zijn. - Controleer de brancard/aankleedtafel op beschadigingen / roestvorming. - Indien insteekdoppen beschadigd zijn, deze vervangen. - Controleer of alle schroeven aanwezig zijn en vast zitten. - Controleer de lagers van de schaarbenen. - Controleer of alle bouten van de actuatoren/pomp goed vastzitten. - Controleer de functionaliteit van de brancard / aankleedtafel. - Controleer de ligplaten of beschadiging.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Actuatoren - Controleer de actuatoren op beschadigingen en speling (Zowel visueel als gehoor)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wielen - Controleer de wielbevestiging, vrijloop en remmen. - Controleer het richtingswiel. - Controleer of alle 4 de wielen het grondvlak raken. - Controleer het loopvlak.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Matras (+ kussen) - Controleer de matras (en kussen) of de bespanning op beschadigingen, verkleuring en vocht in matras, zo nodig vervangen. - Het is sterk aan te bevelen om elke 5 jaar de matras en kussen te vervangen, in verband met hygiëne.	•	•	•	•	A	•	•	•	•	A
Afvoerslang - Controleer de afvoerslang op knikken, lekken en verstopping. - Het is sterk aan te bevelen om elke 3 jaar de afvoerslang te vervangen, in verband met slijtage, verstopping en de hygiëne.	•	•	A	•	•	A	•	•	A	•
Zijhekken - Controleer of de zijhekken soepel open en dicht gaan. - Controleer de vergrendeling. - Controleer of alle boutjes aanwezig zijn en vast zitten. - Controleer of het rode of zwarte dopje op het uiteinde van de hevel aanwezig is. - Het scharnier smeren.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Bediening + noodstop - Controleer alle functies. - Controleer de noodstop/reset noodstop. - Controleer de kabel van de handbediening, indien beschadigd, geknikt of erg opgerekt meteen vervangen. - Controleer de contacten van de controlbox op vervorming of corrosie. - Haal de kabel van de actuatoren los en controleer ze op corrosie, knikken of beschadigingen.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Batterij + Lader - Haal de batterij los en controleer de contacten op vervorming en corrosie. - Controleer de batterij met de tester. - De lader dient elk jaar getest te worden volgens de NEN 3140. - Het is sterk aan te bevelen om elke 3 jaar de batterij te vervangen.	•	•	A	•	•	A	•	•	A	•
Wandframe - Draai de moeren en bouten aan. - Langs elkaar bewegende onderdelen smeren. - Controleer het omhoog en omlaag bewegen. - Controleer op speling.	•	S	•	S	•	S	•	S	•	S

Voor vragen over het onderhoudsprotocol raadpleeg Lopital (telefoon (0031) 13 52 39 300 of mail info@lopital.nl). U dient het serienummer (rood omrand) door te geven aan Lopital. Zie hiervoor de serienummersticker op het product.


 **lopital**[®]
Laarakkerweg 9
5061 JR Oisterwijk
The Netherlands
T: (+31)13-5239300

GTIN (01) 8720256103---


 (11) YYMMDD

CE IP-- **SN (21) -----**

Weight: -- kg / -- lbs
Type battery: --
Drive operates: --V
Charge: -- V--- mA
Non-Continuous: --

 -- kg / -- LBS
Product type

Item no: -----





Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl

Lopital Nederland B.V. Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
Tel +31 (0)13 5239300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl



MAIN4010-01 05-2021