

LUNA[®] X5

Instructiekaart

Handbediening

On


Het groene lampje brandt wanneer de lift actief is. Alle lampjes gaan uit nadat ze ongeveer 3 minuten niet zijn gebruikt.

Omhoog

Omlaag

Reset

5 seconden ingedrukt houden om de noodstop uit te schakelen. Het lampje gaat uit en alle knoppen werken weer.

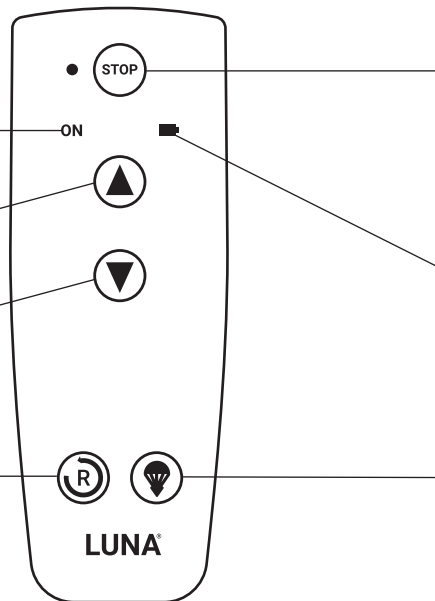

Noodstop

Indrukken om de noodstop te activeren. Rood licht geeft activering aan. Houd de resetknop ingedrukt om de noodstop uit te schakelen.

Batterij

- Groen: 100%
- Oranje: 50% (opladen wordt aanbevolen)
- Rood: Moet worden opgeladen

Nooddaling

Als Omhoog/Omlaag niet werkt. Houd de knop voor nooddaling ingedrukt; het dalen begint na 5 seconden. Tijdens het laten zakken klinkt een constante pieptoon.

Belangrijk

Laad de LUNA[®] X5 op als u deze niet gebruikt:

- De handbediening in het laadstation plaatsen.
- De kabel van de oplader aansluiten op het zijpaneel.


Als het trackstelsel is uitgerust met ITC (In-Track Charging), gebeurt het opladen automatisch.

Nooddaling

Als de elektrische noodverlaging niet werkt.

Gebruik de handmatige noodaalfunctie volgens deze stappen:

- a. Trek de noodsleutel uit die zich aan de zijkant van de LUNA[®] X5 bevindt.
- b. Steek de handmatige noodsleutel in het sleutelgat.
- c. Draai de handmatige noodsleutel linksom om hem handmatig te laten zakken.

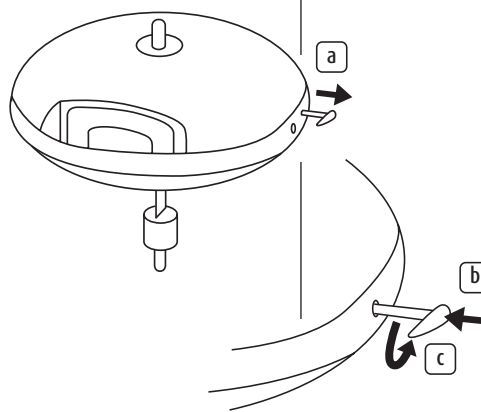

Gebruik de verstelbare hoogte van het bed om de transfer te vergemakkelijken



Trek niet aan de kabel van de handbediening om de plafondtilift te verplaatsen




Zorg ervoor dat je de juiste slingmaat gebruikt voor de gebruiker



Scan for information

Zijpaneel

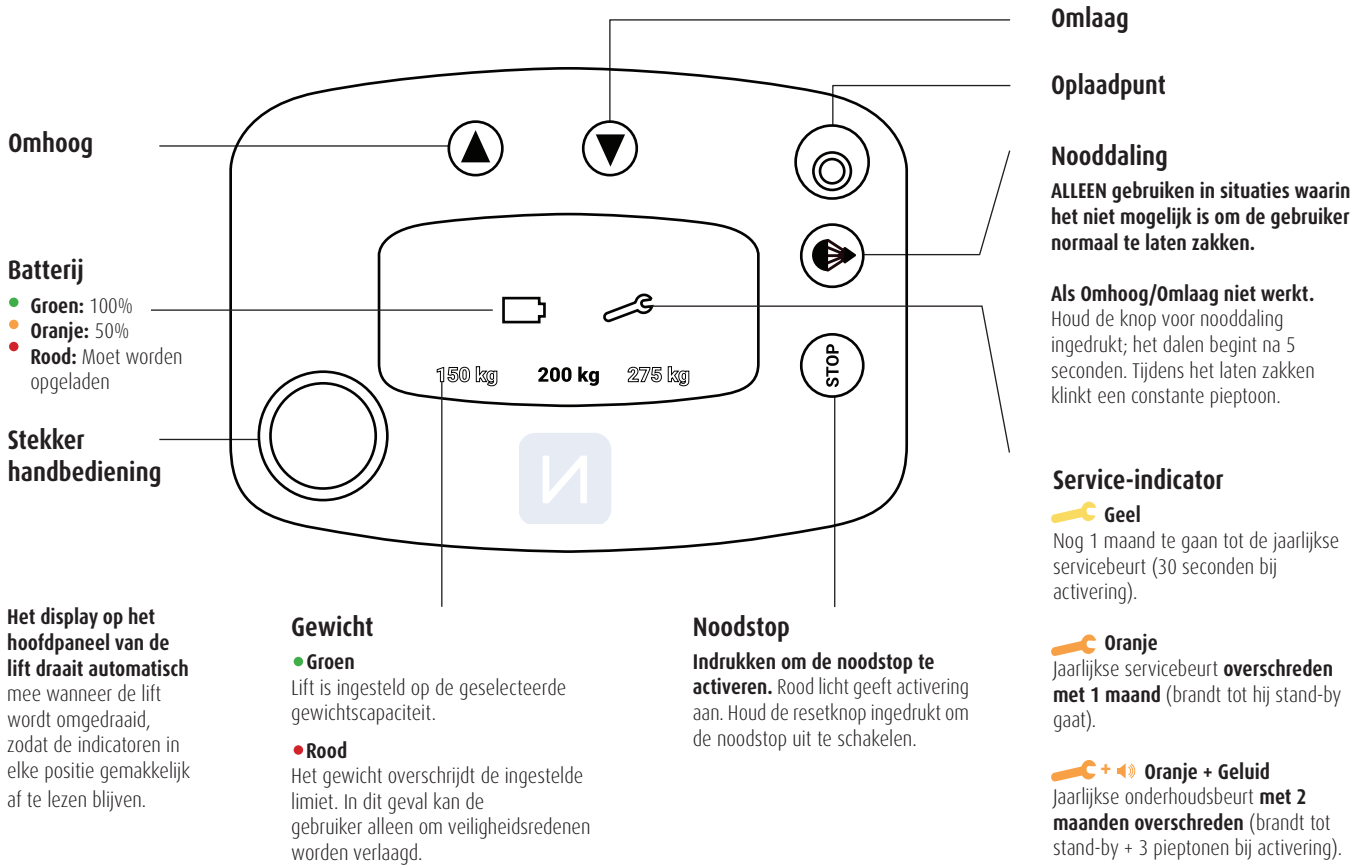

Hoe verplaats je de lift van de ene kamer naar de andere kamer

Om uw lift van vaste naar draagbare modus te schakelen, draait u de lift gewoon ondersteboven. (of andersom)

