



Creating balance in healthcare



Periodiek preventief onderhoud en inspectie

Beknopt onderhoudsprotocol

Flexo Douche-Toilet stoel

Flexo Douche-Toilet stoel

51005199



Inhoudsopgave

Introductie.....	3
Onderhoudsprotocol technische medewerkers	4

Fabrikant

Lopital Nederland B.V.
Laarakkerweg 9
5061 JR Oisterwijk
Nederland
T (0031) 13 52 39 300
www.lopital.nl
E-mail: info@lopital.nl

Al de door Lopital geproduceerde hulpmiddelen voldoen aan de volgende geldende normen: MDR (EU) 2017/745, NEN-EN-ISO 14971, NEN-EN 12182, ISO17966, IEC60529, IEC60601-1, IEC60601-1-2, IEC60601-1-6, IEC62366, CAN/CSA-C22.2 60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, UNI-CEI-EN-ISO 13485, NEN-EN-ISO 9001, NEN-EN-ISO 14001

Introductie

Periodiek preventief onderhoud en inspectie

Om de Flexo in optimale conditie te houden, is het noodzakelijk om op de aangegeven momenten de volgende maatregelen uit te voeren.

De Flexo moet volgens het bijgeleverde onderhoudsschema onderhouden worden en minimaal 1 keer per jaar worden geïnspecteerd.

Reparaties en onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door hiertoe aantoonbaar vakbekwame en specifiek opgeleide personen die goed bekend zijn met ontwerp, gebruik en verzorging van het product. Reparaties en onderhoud dienen te worden uitgevoerd met originele Lopital reserveonderdelen.

De gemiddelde technische levensduur van de Flexo is 10 jaar, mits dagelijks en periodiek onderhoud wordt uitgevoerd.

Het aanbrengen van wijzigingen aan de constructie kan de veiligheid van de Flexo aantasten. Bovendien vervallen hiermee de aansprakelijkheid en garantievoorzwaarden van Lopital. De Flexo voldoet hierdoor niet meer aan de verordening medische hulpmiddelen MDR (EU) 2017/745.

Alle werkzaamheden aan de Flexo dienen te worden genoteerd in een logboek.



Onderhoudsprotocol technische medewerkers


Preventief onderhoud en inspectie moet worden uitgevoerd volgens onderstaand protocol.

Om letsel en/of een onveilig hulpmiddel te voorkomen, moet het onderhoud met de juiste regelmaat worden uitgevoerd door hiertoe aantoonbaar vakbekwame en specifiek opgeleide personen die goed bekend zijn met ontwerp, gebruik en verzorging van het product, die de hiervoor bestemde gereedschappen en onderdelen gebruiken en over kennis van de geldende onderhoudsprocedures beschikken. De Flexo dient minimaal 1 keer per jaar periodiek onderhouden en geïnspecteerd te worden. Het niet uitvoeren van jaarlijks onderhoud en inspectie kan leiden tot gevaarlijke situaties.


• = Controleren S = Smeren A = Aanbevolen vervanging (of delen vervangen) V = Vervangen (of delen vervangen)

Maand	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Algehele staat - Controleer of de gebruikershandleiding aanwezig is. - Controleer of de stickers leesbaar zijn. - Controleer de stoel op beschadigingen / roestvorming. - Controleer of alle schroeven aanwezig zijn en vast zitten. - Controleer of het pompedaal goed vast zit en of het pedaalrubber goed zit. - Stoelen van voor 2006 zijn uitgerust met een vaste scharnierpen met asborgring. Deze moet altijd vervangen worden door een schroefdeel! (art.nr. 70519926)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PUR - Controleer het pur op verkleuring/beschadiging. Bij beschadiging altijd vervangen.	•	•	•	•	A	•	•	•	•	A
Balg - Controleer de balg op beschadiging.	•	•	A	•	•	A	•	•	A	•
Wielen - Controleer de wielbevestiging, vrijloop en remmen. - Controleer of alle 4 de wielen het grondvlak raken. - Controleer of het remlijpje intact is. - Controleer het loopvlak. (Versie van voor 2014 upgraden d.m.v. beschermdop op wielprop en behandelen eventuele roestvorming.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Armsteun/Voorsluiting - Controleer de armsteunen op werking, beschadiging, roestvorming en speling. - Staan de armsteunen evenwijdig? - RVS (A2) bouten en M8x16 Zincflake bouten altijd vervangen door Super duplex 4529 bouten (Lopital art.nr. 75005640), als deze nog niet zijn toegepast.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stoeldrager/onderstel scharnierpunt - Als de stoel niet meer soepel omhoog en omlaag geldt, vervang dan de klembussen, bouten en lagers.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Voetensteun - Controleer de voetensteun op beschadigingen en werking. - Zit de voetplaat nog goed gemonteerd en is de voetplaatdop aanwezig? - Controleer of de voetplaten gelijk staan en iets schuin omhoog naar het midden. Zo niet, controleer ook het beensteunframe. - Bij stoelen van vóór juli 2017 : Bout (M4x10) onder voetplaten controleren en vervangen als het RVS bouten zijn.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Voor vragen over het onderhoudsprotocol raadpleeg Lopital (telefoon (0031) 13 52 39 300 of mail info@lopital.nl). U dient het serienummer (rood omrand) door te geven aan Lopital. Zie hiervoor de serienummersticker op het product.



Laarakkerweg 9
5061 JR Oisterwijk
The Netherlands
T: (+31)13-5239300

GTIN (01) 8720256103---


 (11) YYMMDD

SN (21) -----

CE
Weight: -- kg / -- lbs

 -- kg / -- LBS
Product type

Item no: -----





Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl

Lopital Nederland B.V. Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
Tel +31 (0)13 5239300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl



MAIN5199-08 05-2021