


Viking M / L / XL

Instructiekaart

Nederlands

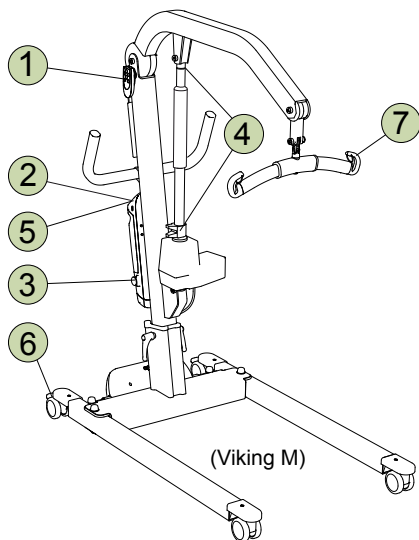

(Viking M)

Veiligheidsvoorschriften


- Lees de gebruiksaanwijzing van de patiëntenlift en de tilaccessoires vóór gebruik zorgvuldig door.
- Zorg voor een goede planning van het tilmoment.
- Voordat de gebruiker wordt opgetild, terwijl de tilbanden reeds gespannen zijn, is het van belang om te controleren of de lussen goed aan het tiljuk zijn vastgehaakt.
- Personeel dat de lift gebruikt bekend is met het juiste gebruik en de bediening van de lift.
- **Maximale belasting:** Viking M 205 kg
Viking L 250 kg
Viking XL 300 kg

Voor behoud van de max. belasting zijn ook accessoires vereist die voor een gelijke belasting of hoger geschikt zijn.

BELANGRIJK!

Deze instructiekaart mag niet worden gezien als een vervanging van de normale gebruiksaanwijzing van de lift. Deze kan worden gedownload bij www.liko.com.


1 Handbediening IR

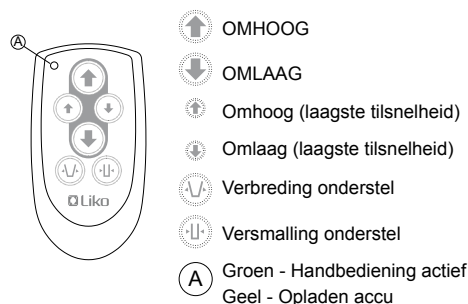

N.B.! Als de lift meer dan 24 uur niet is gebruikt voordat de IR handbediening kan worden gebruikt moet het systeem worden geactiveerd door het indrukken van een willekeurige toets op het bedieningspaneel van de besturing.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.


2 Bedieningspaneel

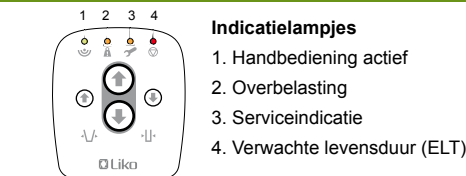


Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

3 Noodstop

Activeren:

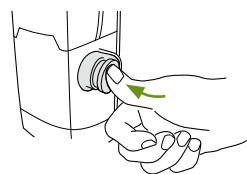


Resetten:

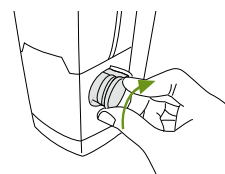

4 Mechanische nooddaalfunctie




Viking M

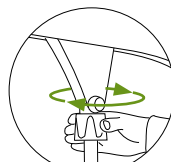


Viking L, Viking XL


5 Elektrische nooddaal-/hef-functie

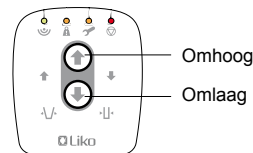


6 Vergrendeling van de wielen

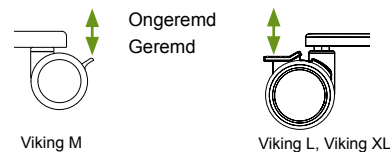

7 Veiligheidsclips

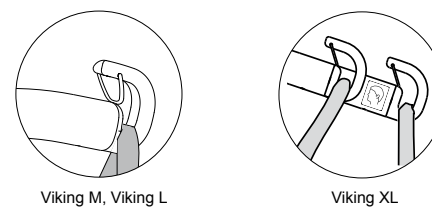


Laden van de batterijen

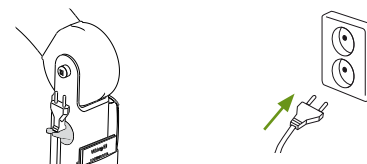

- Houd het voor gewoonte om de batterijen na gebruik te laden.
- Tijdens het laden werkt de lift niet.
- **De lift kan niet worden opgeladen met ingedrukte noodstopknop.**

Positie van de lift bij het

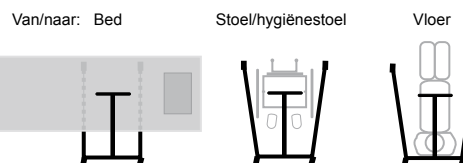

⚠ Door scheef tillen kan de lift kantelen!

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

Ergonomie

- Niet met de hand tillen – laat de lift het werk doen.
- Haast niet – werk rustig en methodisch.
- Spaar uw rug – werk in staande houding met een rechte rug.
- Maak gebruik van de functie voor verhoging/verlaging van het bed.
- Gebruik uw kracht op correcte wijze – sta dichtbij.

Reiniging

Indien nodig kan de lift worden gereinigd door deze met een vochtige doek met warm water of reinigingsalcohol schoon te vegen.

Vereenvoudigd storingzoeken

Controleer:

- of de noodstop soms is ingedrukt, zie ③
- of de accu van de lift opgeladen is
- is de lift de afgelopen 24 uur in gebruik geweest, zie ①
- of de batterijen van de handbediening vol zijn, zie ① A.

Overige instructiekaarten

De instructiekaarten voor Liko patiëntenliften en tilbanden kunnen worden gedownload bij www.liko.com.

© Copyright Liko AB



A Hill-Rom Company

www.liko.com

Distributeur:

Lopital Nederland B.V.
Tel: +31 (0)13 5239300
Fax: +31 (0)13 5239301
info@lopital.nl

7NL137503-01