

Reflex douche-toiletstoel

Instructiekaart

01. Veiligheidsvoorschriften

- Lees vóór gebruik de gebruikershandleiding (www.lopital.nl).
- De maximale belasting is 135 kg.
- Zorg ervoor dat de stoel op de rem staat tijdens cliëntentransfers van en naar de stoel.
- Plaats de voeten op de voetensteun.
- Voorsluiting gesloten bij hoog / laag bewegen en armen op armlegger laten rusten.
- Rijd en manoeuvreer alleen met de stoel in een lage positie.



02. Bedieningspaneel

Omhoog

Omlaag



Voorwaarts kantelen

Achterwaarts kantelen




Activeren (beide tegelijk indrukken)

Vergrendelknop



03. Armsteun met voorsluiting

1. Ontgrendelen
2. Roteren
3. Opklappen

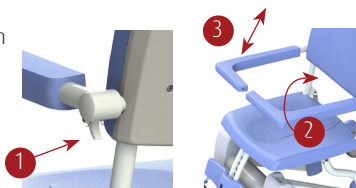

5100 5600
Reflex

5100 5605
Reflex met Flexo
beensteunen



Lader

Armsteun met
voorsluiting

Wielblokkering

Noodknop



Bediening

Zitting + deksel

Geleider
ondersteek

Voetensteun


04. Gebruik

1. Activeer de Reflex door middel van de beide omhoog knoppen tegelijk 2 seconden in te drukken. Let op: Na gebruik gaat de Reflex binnen 60 minuten in slaapstand.
2. Breng de stoel in de juiste positie en klap de voetensteunen omhoog.
3. Zet de stoel op de rem!
4. Open de armleggers en klap deze zo nodig omhoog.
5. Ondersteun de persoon met beperking bij het gaan zitten.
6. Sluit de armsteunen en laat de voeten van de cliënt op de voetplaten rusten.

Opstaan gebeurt in omgekeerde volgorde. Alle functies van de Reflex worden uitgeschakeld door middel van de vergrendelknop. De Reflex dient te worden gereset. Dit doet u door 4 seconden beide omhoog knoppen in te drukken.

05. Wielblokkering

1. Wielblokkering.
2. Ontgrendelen.

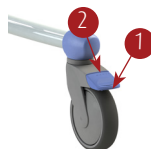

06. Voetensteun

1. Ontgrendelen
2. Complete voetensteun afnemen
3. Gewenste positie kiezen
4. Inhaken en vergrendelen

Zorg ervoor dat de cliënt met beide voeten op de voetplaten rust tijdens het verrijden.



1



2

07. Opladen accu

Sluit de Reflex na gebruik aan op de lader, voor het behoud van de accu's.



Uit
Groen
Knippert oranje
Rood



Slaapstand
Stoel bedrijfsklaar
Accu is bijna leeg
Accu is leeg


Tijdens het laden werkt de Reflex niet.

08. Toiletfunctie

- Verwijder voordat de persoon met beperking plaats heeft genomen de deksel van de zitting.
- In combinatie met toilet: de Reflex kan over bijna ieder toilet gereden worden. Beweeg de stoel omhoog of omlaag voor de juiste positie.
- Met ondersteek: De Reflex kan ook als toiletstoel gebruikt worden. Schuif hiervoor de RVS / kunststof ondersteek in de geleider onder de stoel.

09. Nooddaal & vergrendelknop

1. Bij uitval van alle functies kan de Reflex met de nooddaalhendel worden neergelaten.
2. Alle functies van de Reflex worden uitgeschakeld door middel van de vergrendelknop. Reset de Reflex door beide omhoogknoppen 4 seconden ingedrukt te houden.

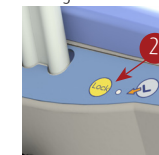

10. Reiniging en onderhoud

De Reflex dient na ieder gebruik gereinigd te worden met water en normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Gebruik hiervoor geen schuurmiddel of andere agressieve oplosmiddelen. Indien nodig kunnen PUR delen met een oplossing van 70% ethanol of propanol gedesinfecteerd worden. Het volledige onderhoudsschema en schoonmaakprotocol is te vinden in de gebruikershandleiding (www.lopital.nl).

Volgens de verordening MDR (EU) 2017/745 voor medische hulpmiddelen moet de Reflex volgens de richtlijnen van de producent onderhouden worden. Het onderhoudsprotocol is te vinden op de website van Lopital (www.lopital.nl).

Belangrijk!

Deze instructiekaart mag niet worden gezien als vervanging van de gebruikershandleiding!

In geval van storing contact opnemen met Lopital.

Tel: +31 (0) 13-5239300

E-mail: info@lopital.nl

Gebruikershandleiding
 Voor een uitgebreide
 gebruikershandleiding
 gaat u naar: www.lopital.nl

