



Als de zorg mag kiezen, kiest de zorg voor Lopital

A black and white photograph showing a male caregiver in a white short-sleeved button-down shirt smiling and assisting an elderly male patient. The patient is wearing a dark polo shirt and is looking towards the caregiver. The caregiver's hands are visible, supporting the patient.

Periodiek preventief
onderhoud en inspectie

Tango Douche-Toilet stoel

Tango Douche-Toilet stoel

51005700



Belangrijk!

De Tango dient minimaal 1 keer per jaar periodiek onderhouden en geïnspecteerd te worden.

Service en onderhoud aan de Tango is alleen toegestaan door daartoe door Lopital geautoriseerde personen en met originele reserveonderdelen.

Het aanbrengen van wijzigingen aan de constructie kan de veiligheid van de Tango aantasten. Bovendien vervallen hiermee de aansprakelijkheid en garantievoorwaarden van Lopital. De Tango voldoet hierdoor niet meer aan de verordening MDR (EU) 2017/745 voor medische hulpmiddelen.

Elke inspectie of reparatie dient te worden genoteerd in het logboek.

De gemiddelde technische levensduur van de Tango is 10 jaar, mits dagelijks en periodiek onderhoud wordt uitgevoerd.

Fabrikant

Lopital Nederland B.V.
Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
T +31 (0)13 5239300
www.lopital.nl, info@lopital.nl

Inhoudsopgave

1.	Algehele staat van de stoel.....	4
2.	Wielen	5
3.	Armleggers.....	7
4.	Voetsteun	8

1. Algehele staat van de stoel
2. Wielen
3. Armleggers
4. Voetsteun

C= Controleren

S= Smeren

A= Aanbevolen vervanging (of delen vervangen)

V= Vervangen (of delen vervangen)



Maand	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Algehele staat	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PUR	C	C	C	C	A	C	C	C	C	A
Wielen	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Armleggers	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Voetsteun	C	C	C	C	A	C	C	C	C	A

1. Algehele staat van de stoel

Maand	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	C	C	C	C	A	C	C	C	C	A

Benodigd gereedschap

- Lakstift Sikkens A77A2

- Controleer of alle stickers nog aanwezig en leesbaar zijn.
 - Serienummersticker:
 - Is het serienummer nog leesbaar?
 - Is de datamatrix nog leesbaar voor een scanner?
 - Is het CE logo nog zichtbaar?
 - Keuringssticker:
 - Is de keuringsdatum nog leesbaar?
 - QR sticker:
 - Is de QR-code nog leesbaar voor een QR scanner?
- De CE sticker dient aanwezig en duidelijk leesbaar te zijn. Dit geldt ook voor de sticker met keuringsdatum.
- Controleer alle gelakte onderdelen visueel op beschadigingen en roestvorming. Indien nodig bijlakken.
- Controleer de PUR onderdelen op ernstige verkleuring (vooral bruin) en op beschadigingen.
- Controleer of alle schroeven aanwezig zijn en vast zitten. Ook van de geleider!

Het is sterk aan te bevelen om elke 5 jaar de zitting, deksel en rug te vervangen, in verband met de hygiëne.

Aanwezig:

- Voetsteunen (geen afkeerpunt)
- Deksel van zitting (geen afkeerpunt)

2. Wielen

Maand	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Benodigd gereedschap

- Inbussleutel 8mm



Figuur 1 Wiel



Figuur 2 Wiel exploded view


- Controleer de bevestiging van het wiel (speling).
- Controleer de werking van vrijloop + remmen.
- Controleer of alle 4 de wielen het grondvlak raken. Zo niet, controleer de stoel op rechtloop.
- Controleer of het remlipje intact is.
- Controleer het loopvlak.

Indien er aan één van deze voorwaarden niet wordt voldaan, vervang het wiel.

Oudere versie wielen, voor juli 2014



Figuur 3 Wiel

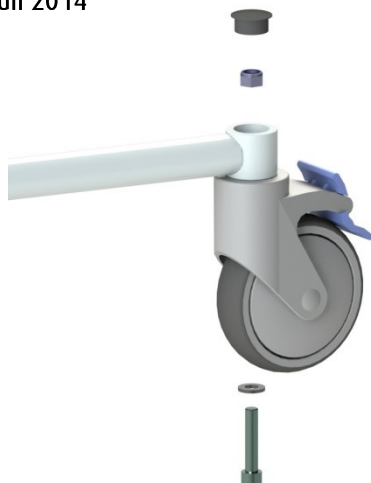

Figuur 4 Wiel exploded view

Benodigd gereedschap

- Dopsleutel 17

- Controleer de bevestiging van het wiel (speling).
- Controleer de werking van vrijloop + remmen.
- Controleer of alle 4 de wielen het grondvlak raken. Zo niet, controleer de stoel op rechtloop.
- Controleer of het remlipje intact is.
- Controleer het loopvlak.

Indien er aan één van deze voorwaarden niet wordt voldaan, vervang het wiel.


Stoelen van vóór Juli 2014 zijn voorzien van stalen wielpropen. Voor deze propen hebben wij een beschermdop die beschadigingen verminderd.

Plaats bij deze stoelen, indien dat nog niet is gebeurd, een wielbuisdop over de wielprop.

- Verwijder de insteekdop
- Controleer de wielprop op roestvorming
- Verwijder de loszittende roest met een staalborstel.
- Behandel de wielprop met roestomvormer Noverox.
- Lak de wielprop vervolgens.
- Laat de lak goed drogen.
- Plaats de wielbusdop over de wielprop

Benodigd gereedschap

- Kunststof hamer
- Hammerite

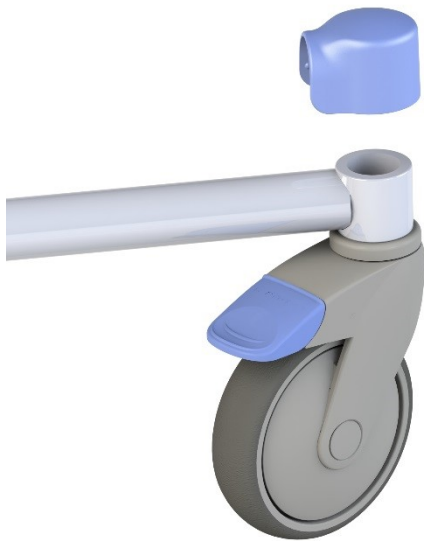

Figuur 5 Stootdop

3. Armleggers

Maand	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Benodigd gereedschap


- Inbussleutel 6mm

- Controleren op werking, beschadigingen (Haarscheurtjes bij de las van de scharnierpen, roest vorming).
- Roestvorming altijd behandelen.
- Staan de armleggers evenwijdig?
- PUR terug schuiven indien nodig.
- **RVS (A2) schroeven en M8x16 DIN912 Zincflake schroeven altijd vervangen door Super duplex 4529 schroeven (art.nr. 75005640)**
- schroeven goed aantrekken. (Zie *figuur 7*)

Kijk voor een exploded view op www.lopital.nl



Figuur 6 Armlegger

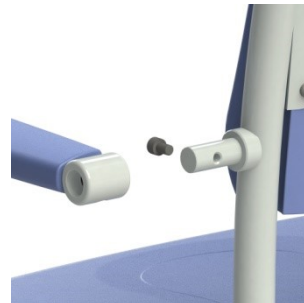

Figuur 7 Schroef

4. Voetsteun

Maand	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Benodigd gereedschap

- Inbussleutel 4mm

Nieuwe versie: Vanaf Serienummer 5700.17.160

- Controleer de voetsteun op beschadigingen.
- Klap de voetplaten op (Ze behoren in opgeklapte stand te blijven staan, zonder automatisch terug te vallen)
- Controleer of de voetplaten gelijk staan en iets schuin omhoog naar het midden. Zo niet, controleer ook het beensteunframe.
- Is de voetplaatdopje aanwezig?



Figuur 8 Voetsteun

Oude voetplaat: Vóór Serienummer 5700.17.160


- Controleer de voetsteun op beschadigingen.
- Klap de voetplaten op (Ze behoren in opgeklapte stand te blijven staan, zonder automatisch terug te vallen)
- Controleer of de voetplaten gelijk staan en iets schuin omhoog naar het midden. Zo niet, controleer ook het frame.
- M5x10 controleren (onderin plaat), RVS schroefjes vervangen door ELVZ 8.8 schroefjes. (Zie figuur 10)



Figuur 9 & 10 Voetsteun

M5x10

Voor vragen over het onderhoudsprotocol raadpleeg Lopital (telefoon +31 (0)13 5239300 of mail info@lopital.nl). U dient het serienummer (rood omrand) door te geven aan Lopital. Zie hiervoor de serienummersticker op het product.

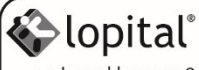		MD -----		
Laarakkerweg 9		REF -----		
5061 JR Oisterwijk		SN -----		
The Netherlands				
T: (031)13-5239300		MAX LOAD		
IPX-		--- KG/---LBS		
Weight: -- kg		-----		
Type battery: ---		-----		
Drives operates: -- V		-----		
Charge: ---V--- mA		-----		
Non continuous: -----		-----		
		CE		(01)-----
		Revision -		(11)-----
				(21)-----



Als de zorg mag kiezen, kiest de zorg voor Lopital



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl

Lopital Nederland B.V. Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
Tel +31 (0)13 5239300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.be

Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
Tel +32 (0)3/870.51.60, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be