



Als de zorg mag kiezen, kiest de zorg voor Lopital




Periodiek preventief onderhoud en inspectie

Sirocco basic + Sirocco basic vaste
hoogte + Sirocco deluxe
Douchebrancard

Sirocco basic
65002500



Sirocco basic vaste hoogte
65002505

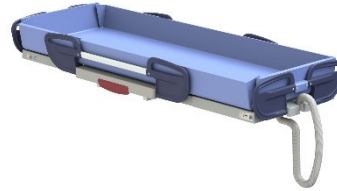

Sirocco deluxe
65002510



Belangrijk!

De Sirocco basic/Sirocco basic vaste hoogte/Sirocco deluxe moeten periodiek, minstens 1 keer per jaar, worden geïnspecteerd.

Service en onderhoud aan de Sirocco basic/Sirocco basic vaste hoogte/Sirocco deluxe is alleen toegestaan door daartoe door Lopital geautoriseerde personen en met originele reserveonderdelen.

Het aanbrengen van wijzigingen aan de constructie kan de veiligheid van de Sirocco basic/Sirocco basic vaste hoogte/Sirocco deluxe aantasten. Bovendien vervallen hiermee de aansprakelijkheid en garantievoorzieningen van Lopital. De Sirocco basic/Sirocco basic vaste hoogte/Sirocco deluxe voldoen hierdoor niet meer aan de verordening medische hulpmiddelen MDR (EU) 2017/745.

Elke inspectie of reparatie dient te worden genoteerd in het logboek.

De gemiddelde technische levensduur van de Sirocco basic/Sirocco basic vaste hoogte/Sirocco deluxe is 10 jaar, mits dagelijks en periodiek onderhoud wordt uitgevoerd.

Fabrikant


Lopital Nederland B.V.
Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
T +31 (0)13 5239300
www.lopital.nl, info@lopital.nl

Inhoudsopgave

1.	Algehele staat van de douchebrancard.....	4
2.	Zijhek	5
3.	Matras.....	6
4.	Afvoerslang	7
5.	Muurframe	8
6.	Bediening, noodstop en daalfunctie.....	9
7.	Accu box	10
8.	Lader.....	11

Sirocco basic/Sirocco basic vaste hoogte/Sirocco deluxe

1. Algehele staat van de brancard
2. Zijhek
3. Matras
4. Afvoerslang
5. Muurframe
6. Lader
7. Bediening + accu box + noodstop + nooddaalfunctie
8. C= Controleren
S= Smeren / onderhouden
A= Aanbevolen vervanging (of delen vervangen)
V= Vervangen (of delen vervangen)

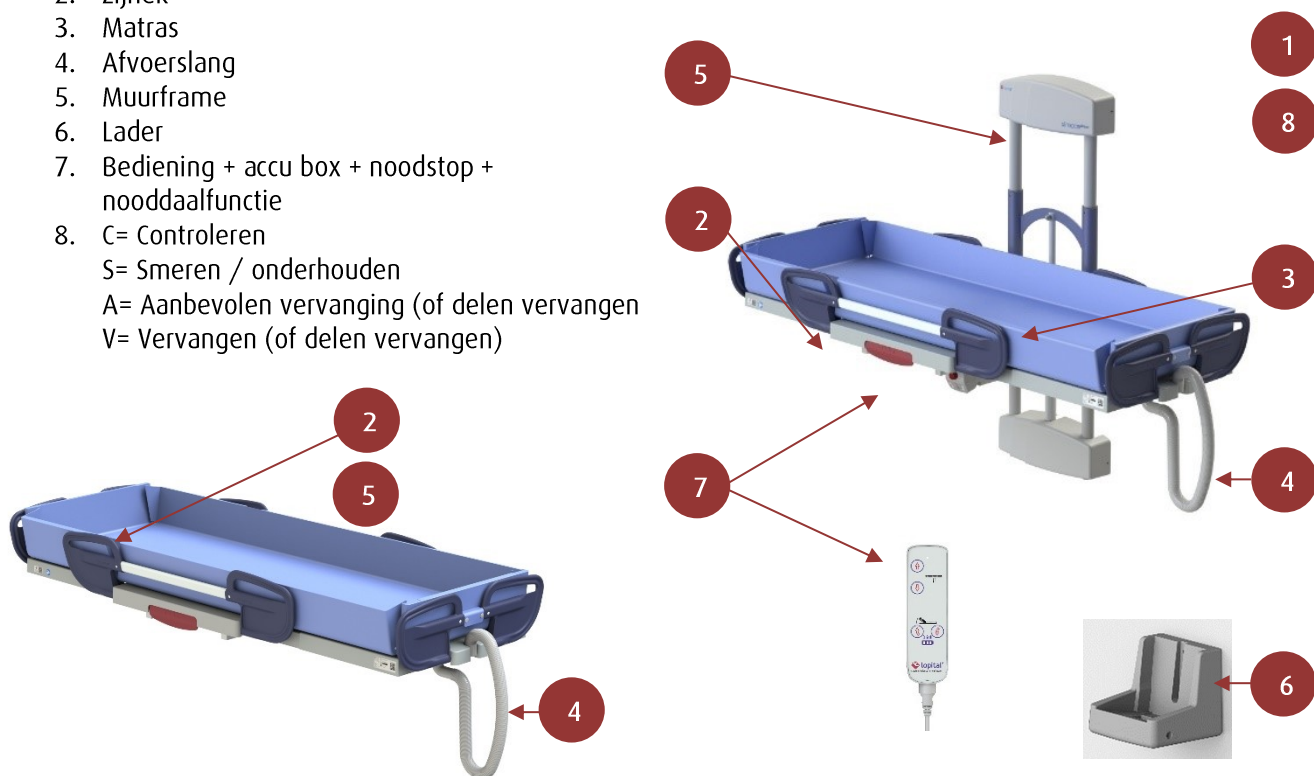

Maand	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Algehele staat	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Zijhek	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Matras	C	C	C	C	A	C	C	C	C	A
Afvoerslang	C	C	A	C	C	A	C	C	A	C
Muurframe	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bediening	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Accu box + lader (jaarlijks NEN3140)	C	C	A	C	C	A	C	C	A	C
Noodstop	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Nooddaalfunctie	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

1. Algehele staat van de douchebrancard

Maand	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Benodigd gereedschap

- Lakstift Sikkens 477A2
- Inbussleutels
- Steek/ringsleutels
- Schroevendraaiers

- Controleer of alle stickers nog aanwezig en leesbaar zijn.
 - Serienummersticker:
 - Is het serienummer nog leesbaar?
 - Is het CE logo nog zichtbaar?
 - Keuringssticker:
 - Is de keuringsdatum nog leesbaar?
 - QR sticker:
 - Is de QR-code nog leesbaar voor een QR scanner?
- Controleer alle gelakte onderdelen visueel op beschadigingen en roestvorming, indien nodig bijlakken.
- Indien insteekdoppen beschadigd zijn, deze vervangen.
- Controleer of alle schroeven aanwezig zijn en vastzitten.
- Controleren of Schroeven van de actuatoren goed vastzitten, zowel boven als onder. Denk hierbij aan zowel de hoog/laag actuator als de rugverstelling actuator (Alleen bij 65002500 en 65002510).
- Controleer de functionaliteit van de hoog/laag beweging en rugverstelling (Alleen bij 65002510).
- Controleer de ligplaten op beschadiging. Bij beschadiging (scheuren) deze vervangen.

Aanwezig:

- Matras
- Lader (alleen bij 65002500 + 65002510)
- Handbediening (alleen bij 65002500 + 65002510)

2. Zijhek

Maand	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S


Benodigd gereedschap

- Steek-/ringsleutel 13
- Inbussleutel 4 mm, 6 mm
- Platte kop schroevendraaier
- Interflon assembly grease
- Interflon fin super

- Het zijhek dient soepel te draaien.
- De vergrendeling dient goed te functioneren en eenvoudig te ontgrendelen.
- Til de midden ligplaat op, zodat het mechanisme van het zijhek te inspecteren is.
- Controleer de bouten op bevestiging.
- De rode ontgrendelhendel dient onbeschadigd te zijn.
- Smeer het scharnier (as) in, (bij voorkeur met Interflon fin super) nadat overtollig vuil is weggehaald.
- Smeer het grendelhaakje en de gaffel in, (bij voorkeur met Interflon assembly Grease).



Figuur 1 t/m 4 Zijhek

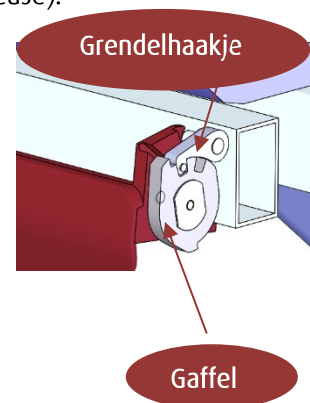

3. Matras

Maand	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	C	C	C	C	A	C	C	C	C	A

Benodigd gereedschap

-

Controleer het matras op beschadigingen en vervang zo nodig het matras.

Afkeurpunten:

- Beschadigingen
- Scheuren
- Vocht in matras
- Ernstige verkleuring
- Ernstige schimmelvorming (vooral onderzijde)

Laat eventueel eerst het matras goed schoonmaken en controleer daarna opnieuw.

Het is aan te bevelen om elke 5 jaar het matras te vervangen in verband met hygiëne.

4. Afvoerslang

Maand	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	C	C	A	C	C	A	C	C	A	C

Benodigd gereedschap

-


Controleren op knikken, lekken of verstopping.

Afkeerpunten:

- Knikken
- Scheuren
- Verstopping
- Wartel gescheurd
- Uitloop beschadigd

Het is aan te bevelen om elke 3 jaar de afvoerslang te vervangen, dit in verband met slijtage, verstopping en hygiëne.

1. Uitloop
2. Klemring
3. Afvoerslang

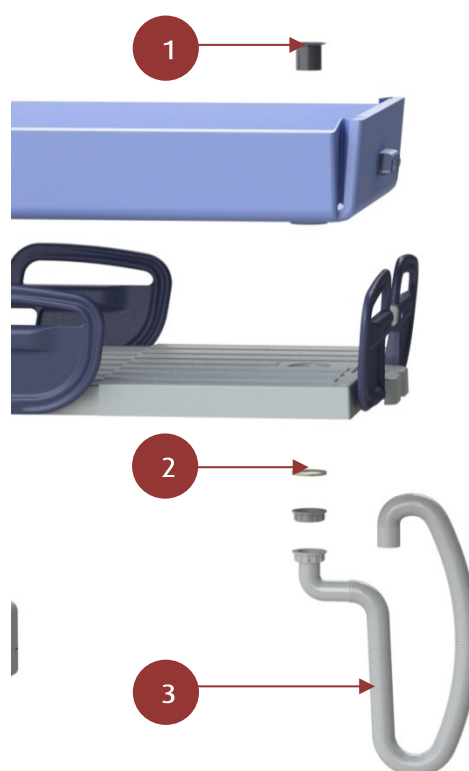

Figuur 5 Afvoerslang

5. Muurframe

(alleen bij 65002500 en 65002510)

Maand	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

- Verwijder de kunststof kappen en controleer de kappen op scheuren.
- Controleer de muurbevestiging.
- Plaats de kappen weer terug.
- Controleer de lagers, indien beschadigd deze vervangen.

(alleen bij 65002505)

Maand	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

- Controleer de muurbevestiging.

6. Bediening, noodstop en daalfunctie

(alleen bij 65002500 en 65002510)


Maand	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Noodstop	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Nooddaal functie	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bediening	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Benodigd gereedschap


- Multimeter

- Controleer alle functies (let ook op eventuele bijgeluiden).
- Wanneer de daalknop wordt ingedrukt dient het ligvlak te dalen.
- Wanneer de noodstop is ingedrukt, dient de brancard op geen enkel commando te reageren.
- Controleer de kabel van de handbediening, indien deze beschadigd is, geknikt is of erg is opgerekt deze vervangen.
- Controleer de kabel van de actuatoren op knikken of andere beschadigingen.

1. Aansluiting handbediening
2. Aansluiting actuator Hoog laag
3. Aansluiting actuator rug (Alleen bij 65002510))
4. Controlbox
5. Nooddaalknop
6. Noodstop

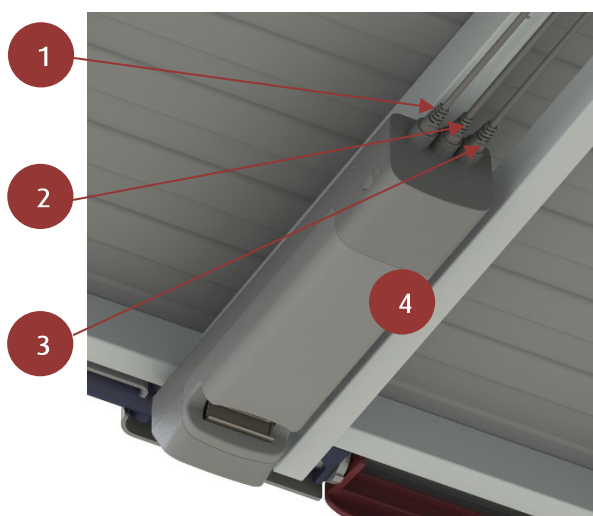

Figuur 12 Aansluitingen

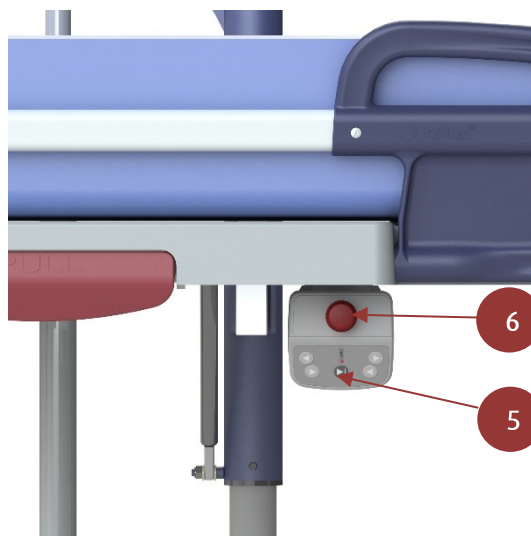

Figuur 13 Elektrische componenten

7. Accu box

(alleen bij 65002500 en 65002510)


Maand	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	C	C	A	C	C	A	C	C	A	C

Benodigd gereedschap

- Accutester

- Alleen geladen accu's zijn te controleren!
- Vervangen bij < 2 Ah (< 70%)
- Vervangingsdatum vermelden op de accu box.
- Bij beschadiging de accu box altijd vervangen.

Het is sterk aan te bevelen om elke 3 jaar de accu box te vervangen.

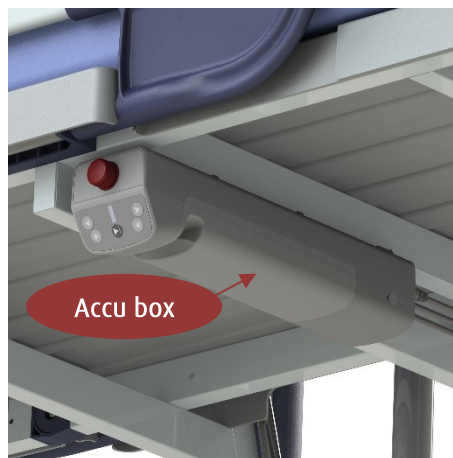

Figuur 14 Accu box

8. Lader

(alleen bij 65002500 en 65002510)

Maand	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Benodigd gereedschap

- NEN 3140 Test
apparatuur

- De lader moet elk jaar getest worden volgens de NEN 3140 en worden voorzien van een identificatienummer en NEN 3140 sticker.
- Controleer of er beschadigingen zijn (stekker + kabel + houder), als de kabel is beschadigd de gehele lader vervangen.
- Controleer de laadspanning, deze moet minimaal de waarde aangeven zoals vermeld op de lader. *(Zie figuur 15)*
- Controleer of er niet teveel corrosie op de contacten van het laadstation zit, ook de laadaansluiting op de control box controleren.



Figuur 15 Lader

Voor vragen over het onderhoudsprotocol raadpleeg Lopital (telefoon +31 (0)13 5239300 of mail info@lopital.nl). U dient het serienummer (rood omrand) door te geven aan Lopital. Zie hiervoor de serienummersticker op het product.

 lopital® Laarakkerweg 9 5061 JR Oisterwijk The Netherlands T: (031)13-5239300	MD		
	REF		
	SN		
	 --- KG/---LBS		
IPX- Weight: -- kg Type battery: --- Drives operates: -- V Charge: ---V--- mA Non continuous: -----		 Revision -	(01)----- (11)----- (21)---.-.-



Als de zorg mag kiezen, kiest de zorg voor Lopital



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl

Lopital Nederland B.V. Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
Tel +31 (0)13 5239300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.be

Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
Tel +32 (0)3/870.51.60, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be